

Arion Magnide® 2in1


für Kompressionsstrümpfe mit geschlossener und offener Spitze

VERSCHREIBUNGS
FÄHIG

- An- und Ausziehhilfe
- Kompakt und leicht
- Für zu Hause und unterwegs
- Leichte Anwendung und schnelles Zusammenlegen durch den Einsatz von Magneten
- Hochwertige Qualität – strapazierfähiges und reißfestes Material
- Einzigartige Gleiteigenschaft reduziert Reibung zwischen Haut und Kompressionsversorgung
- Erhältlich in 3 Größen (M: Schuhgröße < 38, L: Schuhgröße 39-43, XL: Schuhgröße ≥ 44)

Bitte bereitlegen:

- Ihre medizinischen Kompressionsstrümpfe
- Arion Magnide® 2in1 An- und Ausziehhilfe
- Wir empfehlen außerdem: BEISANA gripStar Handschuhe

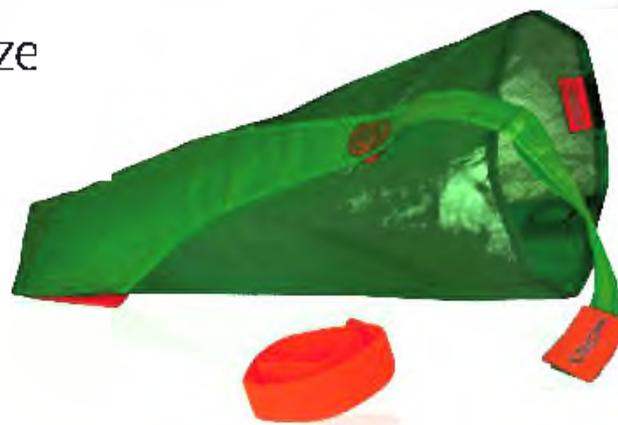

Achtung!

Die Arion Magnide® 2in1 enthält mehrere Magnete. Bitte beachten Sie den Mindestabstand von 30 cm bei Herzschrittmachern.

1. Magnide® 2in1 anlegen




Schlüpfen Sie mit dem Fuß in die Magnide® 2in1. Schieben Sie den Fuß nicht ganz bis zum Ende der Magnide® 2in1, lassen Sie 2 oder 3 Finger Platz vor den Zehen. Ziehen Sie die Magnide® 2in1 über den Fuß und achten Sie darauf, dass die orangefarbene Lasche an den Zehen gut zurückgeklappt ist, sodass der Magnet schließt.

2. Strumpf über den Fuß streifen



Nun streifen Sie den Strumpf mit beiden Händen in kleinen Bewegungen über den gesamten Fuß. Bitte dabei den Strumpf nicht aufrollen. Achten Sie darauf, dass Ferse und Spitze gut sitzen und sich der restliche Strumpf auf Knöchelhöhe befindet. Vergewissern Sie sich, dass die hellgrüne Schlaufe oberhalb des Strumpfes herauskommt und oben am Strumpf festgehalten werden kann.

3. Magnide® 2in1 entfernen

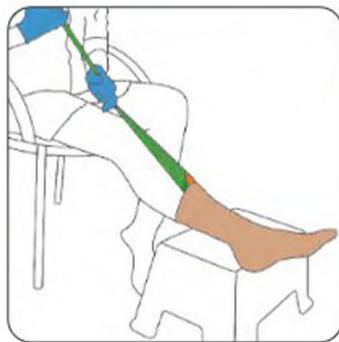

Anschließend kräftig und gleichmäßig an der hellgrünen Schlaufe ziehen, um die Magnide® 2in1 aus dem Strumpf zu entfernen.

4. Fertig anziehen



Den restlichen Strumpf gleichmäßig Stück für Stück am Bein anlegen. Bitte dabei nicht am Oberrand (Haftband, Bündchen) ziehen.

Bei Schenkelstrümpfen das Haftband zum Schluss nur noch umklappen. Zuletzt das Gestrick noch einmal am gesamten Bein verteilen, damit es faltenfrei und angenehm anliegt.

Für die nächste Verwendung vorbereiten


1. Schlaufe befestigen



Die Oberseite der Schlaufe mithilfe des Magneten an der Oberseite der Magnide® 2in1 befestigen. Die Magnide® 2in1 umdrehen und auf eine flache Oberfläche legen.




Bitte achten Sie darauf, dass die Magnide® 2in1 komplett aufgefaltet ist und die Schlaufe unten liegt.

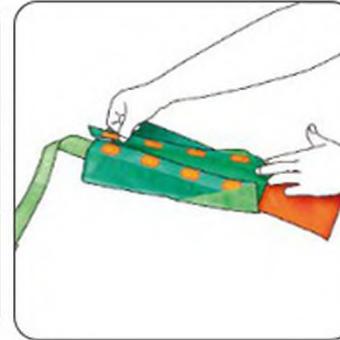

Die Seiten zur Mitte falten, sodass die Magnete schließen. Achten Sie darauf, dass die Magnetpunkte exakt aufeinander liegen. Auf der Außenseite sind nun die orangefarbenen Nähte sichtbar.

2. Magnete schließen und Zehenlasche umklappen

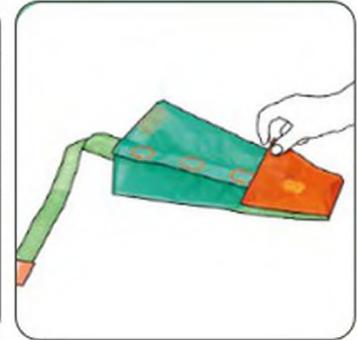

Die orangefarbene Lasche hochklappen, sodass der Magnet auf dem grünen Material schließt. Die Magnide® 2in1 ist nun wieder für den nächsten Einsatz bereit.


AUSZIEHEN

1. Ausziehhilfe anlegen




Ziehen Sie die Magride® 2in1 über den Strumpf und lösen Sie die hellgrüne Schlaufe, welche auf dem Fußrücken sitzen muss. Nehmen Sie das mitgelieferte orangefarbene Klettband und schließen Sie es direkt über dem Knöchel, sodass die Ausziehhilfe am Bein angenehm fest sitzt und nicht rutschen kann.

2. Klettband abdecken

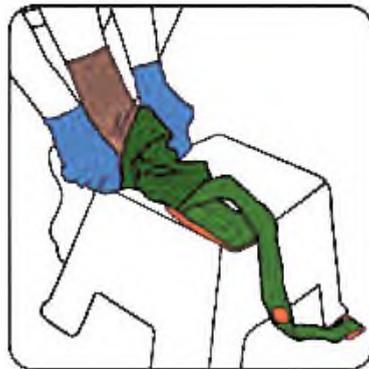

Den oberen Teil der Magride® 2in1 so weit wie möglich über das Klettband umschlagen. Streifen Sie den Strumpf oberhalb des Knöchels mithilfe der RFI SANA gripStar Handschuhe so weit wie möglich über die Magride® 2in1 (bis auf Höhe des Klettbands). Dabei den Strumpf nicht aufrollen. Das Klettband verhindert dabei, dass die Magride® 2in1 vom Fuß rutscht.

3. Strumpf über die Magnide® 2in1 ziehen und vom Fuß abstreifen

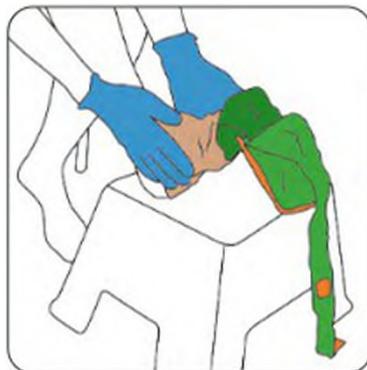

Streifen Sie mit beiden Händen den Strumpf in kleinen Bewegungen über die Ferse und den Fuß.

Durch das glatte Oberflächenmaterial der Magnide® 2in1 lässt sich der Strumpf problemlos über den Fuß schieben.

4. Magnide® 2in1 samt Strumpf entfernen



Magnide® 2in1 zusammen mit dem Strumpf vom Fuß entfernen. Dann den Strumpf vorsichtig von der Magnide® 2in1 abziehen und auf rechts stülpen. Die Magnide® 2in1 gleich für den nächsten Einsatz vorbereiten (Seite 9).