

BORT 30°-Außenrotationskeil für OmoARS Zusatzkeil



Gebrauchsanweisung

REF 121 960



BORT. Das Plus an Ihrer Seite.

D121960|2023-05|007 DE I Rev. 01

Vielen Dank für das Vertrauen in ein Produkt der BORT GmbH. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Fachhandel von dem Sie dieses Produkt erhalten haben.

Zweckbestimmung

Optionaler Zusatzkeil zur Lagerung in 30° Außenrotation für:
REF 121 030/121 030 F BORT OmoARS kurz,
REF 121 900/121 900 F BORT OmoARS und
REF 121 970/121 970 F BORT OmoARS mit 3-Punkt-Gurt.

Kontraindikationen

Nur in Verbindung mit BORT OmoARS. Sollte eine Außenrotationsstellung von weniger als 30° angezeigt sein, darf dieser Artikel nicht an BORT OmoARS adaptiert werden.

Materialzusammensetzung

Polyamid (PA), PUR-Schaum, Polyester (PES), Baumwolle (CO)
Die genaue Materialzusammensetzung entnehmen Sie bitte dem eingnähten Textiletikett.

Gebrauchsanleitung

Zur Erhöhung der Außenrotationsstellung des Armes von 15° auf 30° wird der optionale Keil mittels Hakenband zwischen dem Basiskissen und der Armtragetasche eingeklettet. Die breite Seite zeigt hierbei vom Körper weg. Die Positionierung kann frei variiert werden.

Reinigungshinweise

Den Schaumstoffkeil aus der Stofftasche entnehmen. Der Bezug kann in lauwarmem Wasser mit mildem Feinwaschmittel von Hand gewaschen werden. Klettverschluss schließen, um Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden. Nach dem Waschen in Form ziehen und an der Luft trocknen. Hitze vermeiden.

Nutzungsdauer/Lebensdauer des Produkts

Die Lebensdauer des Medizinprodukts wird durch den natürlichen Verschleiß bei sach- und anwendungsgemäßigem Umgang bestimmt.

Entsorgung

Nach Nutzungsende muss das Produkt entsprechend örtlicher Vorgaben entsorgt werden.

Stand: 05.2023

 Einzelner Patient – mehrfach anwendbar



BORT GmbH
Am Schweizerbach 1 | D-71384 Weinstadt | www.bort.com



PDF: ga.bort.com

