

# ANLEGEN DER MANU-CAST® ORGANIC P

## FITTING THE MANU-CAST® ORGANIC P



### SCHRITT 1

Öffnen Sie die Klettverschlüsse der MANU-CAST® ORGANIC P.

### STEP 1

Open the Velcro fasteners of the MANU-CAST® ORGANIC P.



### SCHRITT 2

Ziehen Sie die Orthese über die Hand.

### STEP 2

Pull the brace over the hand.



### SCHRITT 3

Der anatomisch vorgeformte Gitterrahmen liegt dabei an der Handinnenseite an.

### STEP 3

The anatomically pre-shaped lattice frame rests against the inside of the hand.



### SCHRITT 4

Der obere Steg muss zwischen dem Daumen und Zeigefinger liegen.

### STEP 4

The upper bar must lie between the thumb and the index finger.



### SCHRITT 5

Verschließen Sie die Klettverschlüsse mit dosiertem Zug. Der Handgelenkgurt wird dabei zirkulär um Handgelenk und Orthese gewickelt.

### STEP 5

Close the Velcro fasteners with measured tension. The wrist strap is wrapped circularly around the wrist and brace.



## SCHRITT 6

Bei MANU-CAST® ORGANIC P kann der Daumenverschluss gegebenenfalls in der Position individuell verändert werden.

## STEP 6

With MANU-CAST® ORGANIC P, the position of the thumb closure can be changed individually if necessary.



## SCHRITT 7

MANU-CAST® ORGANIC P ist richtig angezogen, wenn der anatomisch vorgeformte Gitterrahmen formschlüssig an Handinnenfläche, Handgelenk und Unterarm anliegt.

## STEP 7

MANU-CAST® ORGANIC P is properly tightened when the anatomically preshaped mesh frame fits snugly against the palm, wrist and forearm.



## SCHRITT 8

Zum Ablegen von MANU-CAST® ORGANIC P öffnen Sie die zirkulären Klettbinden und ziehen die Orthese mit der anderen Hand ab.

## STEP 8

To remove MANU-CAST® ORGANIC P, open the circular Velcro straps and pull the brace off with the other hand.