

MEDsan[®] SARS-CoV-2 Ag Duo

Kurzanleitung

Gemeinsame Schritte


Schritt 1:

Herrichten

MEDsan[®] SARS-CoV-2 Ag Duo 1er/25er







MEDsan[®] SARS-CoV-2 Ag Duo 1000er

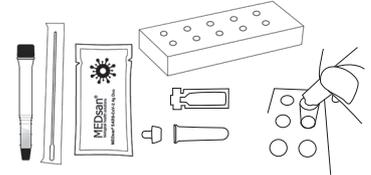

Puffer einfüllen

Schritt 2:


Probenentnahme

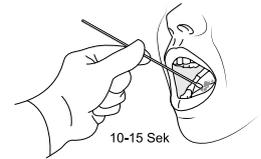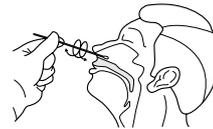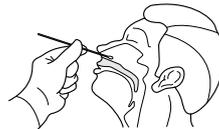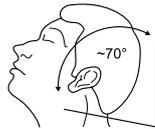


Schritt 3:

Probe in Extraktionsröhrchen → Rühren → 1 Minute warten

Schritt 4:

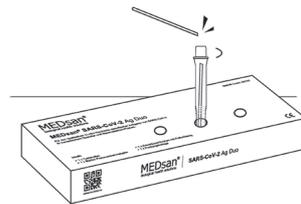


Tupfer abbrechen

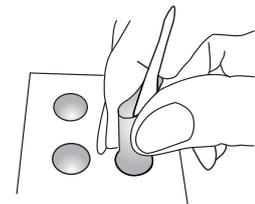


Tupfer ausdrücken, wegwerfen

Schritt 5:

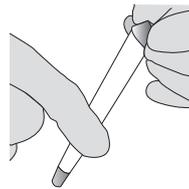


Deckel oben draufschauben,
unteren Teil abschrauben

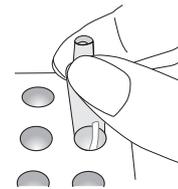

Dosierkappe aufstecken

Schritt 6:

2 Tropfen in die Kassette tropfen
15 Minuten warten

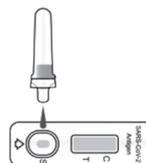

Schritt 7:

Auswerten

