
Gebrauchs- anweisung

Applikationshilfe für Augentropfen (EDO)



Hersteller

Spruyt hillen bv
Tinbergenlaan 1
NL-3401 MT IJsselstein
Tel +32 (0)30-2814411

Vertrieb:

Fagron GmbH & Co. KG
Wilhelm-Bergner-Straße 11 g
D- 21509 Glinde
Tel.: +49 (0)40 670 67 5
fagron.de



Minim
Eyot®



Eyot® ist eine registrierte Schutzmarke.
Version Mai 2015


Produkteigenschaften

Das Minim Eyot® ist ein Hilfsmittel zum Einbringen von Augentropfen in Einzeldosen (EDO).

Das Minim Eyot® ist ein Hilfsmittel, das ausschließlich in Kombination mit Augentropfen verwendet werden kann, die in einem Einzeldosisbehältnis verpackt sind.

Das Minim Eyot® ist aus wiederverwendbarem thermoplastischem Kunststoff hergestellt.

Minim Eyot® entspricht den Bestimmungen der europäischen Gesetzgebung für Medizinprodukte der Klasse I.

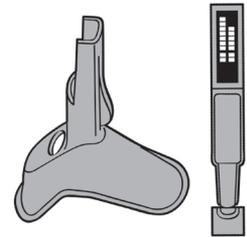

Warnung

Drücken Sie das Einzeldosisbehältnis vor Gebrauch fest in das Minim Eyot® bis das Tropfende vollständig aus dem Minim Eyot® herausragt. So wird verhindert, dass die Tropfen aus dem Einzeldosisbehältnis versehentlich auf das Minim Eyot® kommen.

Reinigung

Trockenreinigung:

Entfernen Sie das Einzeldosisbehältnis und reinigen Sie das Minim Eyot® mit einem sauberen, trockenen Tuch.

Nassreinigung:

Entfernen Sie das Einzeldosisbehältnis und spülen Sie das Minim Eyot® mit warmem Wasser ab. Trocknen Sie das Minim Eyot® mit einem sauberen Tuch. Verwenden Sie kein heißes oder kochendes Wasser. Reinigen Sie das Minim Eyot® nicht in der Spülmaschine.

Anwendung



Bitte lesen Sie die Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie dieses Hilfsmittel verwenden.

Waschen Sie Ihre Hände und setzen Sie sich auf einen Stuhl mit niedriger Rückenlehne.

1

Schütteln Sie das Einzeldosisbehältnis sofern es sich um ein Gel handelt, damit sich keine Luft vor dem Tropfer befindet.



2


Drehen Sie die Verschlusskappe des Einzeldosisbehältnisses ab.



3

Stecken Sie das Einzeldosisbehältnis wie abgebildet fest in das Minim Eyot®.

Das Tropfende des Einzeldosisbehältnisses muss vollständig aus dem Minim Eyot® herausragen.

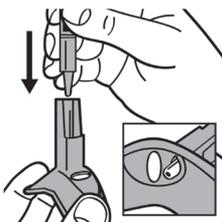

4

Setzen Sie das Minim Eyot® wie abgebildet unter Ihr Augenlid auf und ziehen Sie Ihr Augenlid damit vorsichtig nach unten, sodass das Minim Eyot® auf Ihrem Jochbein ruht.



5

Kippen Sie die Oberkante des Minim Eyot® bis auf Ihre Augenbraue. Die Spitze des Einzeldosisbehältnisses sollte sich jetzt genau vor Ihrem Auge befinden.



6

Legen Sie Ihren Kopf in den Nacken und schauen Sie durch die obere Öffnung des Minim Eyot®, bis Sie die Zimmerdecke senkrecht über sich sehen.

In dieser Haltung befindet sich Ihr Kopf in der richtigen Position, um die Tropfen korrekt einzubringen.



7

Schauen Sie weiter an die Zimmerdecke und drücken Sie das Einzeldosisbehältnis vorsichtig mit Daumen, Zeigefinger sowie Mittelfinger zusammen, bis ein Tropfen in das Auge gelangt. Nehmen Sie das Minim Eyot® vom Auge und drücken Sie leicht mit einem Finger für 1 bis 2 Minuten auf den Augenwinkel.



8

Entfernen Sie das leere Einzeldosisbehältnis aus dem Minim Eyot® und werfen Sie sie weg.

