

# REFIT

Ein praktischer Zement für das vorübergehende Befestigen von KRONEN BRÜCKEN, VERBLENDUNGEN & TEILKRONEN



## BITTE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG LESEN

REFIT wird vorübergehend zum Wiedereinsetzen von herausgefallenen Kronen, Brücken, Verblendungen und Teilkronen verwendet. Diese sind im Allgemeinen festsitzende Zahnprothesen und normalerweise dauerhaft im Gebiss fixiert.

Zur Anwendung bitte den nachstehenden Anweisungen folgen. Danach möglichst bald einen Zahnarzt konsultieren.

1. Zuerst die Zähne gründlich putzen. Danach die herausgefallene Prothese gründlich waschen und abtrocknen. Falls erforderlich, trockene Zementreste mit einer Nadel oder einem anderen spitzen Gegenstand vorsichtig von der Passfläche der Prothese entfernen.



2. Entnehmen Sie der Verpackung eine Kapsel. Durch leichtes Antippen das Pulver in dem größeren Teil der Kapsel sammeln und vorsichtig öffnen.

3. Tropfen Sie ungefähr drei Tropfen Wasser in die Kapsel bis die gleiche Menge an Wasser und Pulver in der Kapsel ist.

4. Die Kapsel schnell wieder verschließen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben die Kapsel zu verschließen, können Sie die offene Seite auch mit einer Fingerkuppe abdecken.

5. Halten Sie die Kapsel zwischen Daumen und Mittelfinger und schütteln Sie diese für drei Sekunden.

6. Die Kapsel öffnen und das Zementgemisch auf die Passfläche der Prothese aufbringen.

Die Kapsel kann auch ausgedrückt werden, um das Zementgemisch direkt auf die Passfläche zu geben.

7. Jetzt die Prothese wieder einsetzen und hin und her bewegen.

8. Das Gebiss schließen. Prüfen, ob die Prothese bequem sitzt und die anliegenden Zähne nicht stört. Ist dies nicht der Fall, die Prothese schnell entfernen und den Zementierungsvorgang wiederholen.

9. Nach dem Einsetzen der Prothese das Gebiss drei Minuten fest geschlossen halten, damit der Zement trocknen kann.

10. Zuletzt die Zähne gründlich putzen, um überschüssigen oder ausgeflossenen Zement zu entfernen.

11. Kontinuierlich nicht länger als 28 Tage verwenden.



### WICHTIG

Reinigen Sie die Zähne und die Prothese gründlich. Folgen Sie den Anweisungen. Schnellstens den Zahnarzt aufsuchen.



### WICHTIG

Nicht an gebrochenen oder lockeren Zähnen verwenden. Nicht verwenden, wenn Blutungen im Zahnbereich bestehen. Nicht verwenden, wenn der Zahnbereich schmerzt. Nicht verwenden um Prothesen zu reparieren. NICHT SCHLUCKEN!

REFIT – Zahnzement besteht aus modifiziertem Zink-Polycarboxylat, ein feines Material zur vielfältigen Verwendung in der Zahnmedizin.

### Inhalt und Verwendung

3 vordosierte Kapseln (beinhalten 0,3 bis 0,5 g des Puders) und einen Applikator. Nur mit trockenen Händen verwenden.

### Aufbewahrung

Nach Verwendung, Packung fest verschließen. Kühl und trocken lagern.

### Inhaltsstoffe

In Gramm von 100 Gramm des Pulvers:  
Zinkoxid 64,93 g, Polyacrylsäure 22,00 g,  
Magnesiumoxid 13,00 g, Eisenoxid 0,07 g



HERSTELLER: G.A.P. Research Company Ltd., Kent. DA11 9DZ United Kingdom.



Denvtech Ltd., Ground floor, 8-9 Marino Mart, Fairview, Clontarf, Dublin 3, DO3 P590

Made in United Kingdom

DISTRIBUTOR:

**Megadent**

Deflogrip G. Reeg GmbH – 40211 Düsseldorf  
[www.megadent.de](http://www.megadent.de)



Issue 3 02.2020 Megadent Refit Easy CAP IFU