



**TOOTHFIL – PLUS**

**Temporäre Zahnfüllung**

**BITTE VOR ANWENDUNG LESEN**

Toothfil-Plus ist ein stark haftendes dentales Stärkungsmittel, speziell formuliert für das temporäre Füllen von Zahnholräumen.

Für eine korrekte Anwendung folgen Sie bitte den Anweisungen weiter unten und suchen Sie dann professionelle Beratung von Ihrem Zahnarzt auf.

1. Zähne gründlich putzen
2. Eine Kapsel aus der Packung nehmen, auf den größeren Teil der Kapsel klopfen und dann die beiden Teile leicht auseinanderziehen.
3. So viel Wasser in die Kapsel tropfen, bis das Verhältnis von Wasser und Pulver gleich ist (meist reichen 2-3 Tropfen).
4. Die Kapsel schnell schließen. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, die beiden Kapselteile zu verbinden, reicht es, wenn Sie die Kapselöffnung mit den Fingerspitzen abdecken.
5. Kapsel zwischen Finger und Daumen halten und 2-3 Sekunden schütteln.
6. Kapsel öffnen und ungefähr eine Minute warten, bis aus dem angemischten Toothfil-Plus eine weiche, klebrige Füllmasse wird.
7. Etwas Toothfil-Plus auf den kleinen Spachtel nehmen und damit den Zahnholraum ausfüllen, oder die feuchte Masse mit den Fingern einer Hand auf die Finger der anderen Hand drücken, daraus kleine Kügelchen formen und diese dann in den Zahnholraum geben.
8. Toothfil klebt und härtet sehr schnell, deshalb mit den feuchten Fingern von dem gefüllten Zahn möglichst schnell alle Reste entfernen. Danach den Kiefer schließen und die Zähne leicht von einer Seite auf die andere bewegen, um überschüssiges Material von der Bissfläche zu entfernen.
9. Mund gründlich ausspülen, um überschüssiges Toothfil aus dem Mund zu bekommen.
10. Das Präparat ununterbrochen nicht länger als 28 Tage verwenden.

**WICHTIGE ANWENDUNGSHINWEISE**

Befolgen Sie die Anleitung

Konsultieren Sie frühestmöglich einen Zahnarzt

Nicht anwenden bei Zahnfleischbluten im Zahnbereich

Nicht anwenden bei Schmerzen im Zahnbereich

Nicht schlucken

Nicht auf Zahnersatz anwenden.

Toothfil-Plus ist ein modifizierter Zink-Polycarboxylat-Zahnzement, ein feines Material, geschmacksfrei und zur vielfältigen Verwendung in der Zahnmedizin.

## INHALT UND HANDHABUNG

3 vordosierte, feuchtigkeitsempfindliche Kapseln.  
Nur mit trockenen Händen anfassen und an einem trockenen Ort lagern.

## LAGERUNG

Deckel nach der Verwendung sicher verschließen.  
Trocken und kühl lagern.

Hergestellt in UK GB072017 Issue 2



HERSTELLER:

GAP Research Company Ltd., Kent DA11 9DZ.

DISTRIBUTOR:

**Megadent**

Deflogrip G. Reeg GmbH – 40211 Düsseldorf

[www.megadent.de](http://www.megadent.de)

1. Kapsel öffnen



2. Wasser hinzufügen



3. Kapsel schließen



4. 3 Sekunden lang schütteln



5. Toothfil-Plus herausnehmen oder drücken

