

AQUAglide®

Gleit + Verwöhnigel *lubricant + lovegel*

Made with Love
in Europe ★★★★★

Das Original als Gleit- und Verwöhnigel für individuelle sinnliche Erlebnisse.



- Langzeit-Gleiteigenschaften
- haut- und schleimhautverträglich
- wasserlöslich und fettfrei
- sehr ergiebig und klebt nicht
- latex- und kondomgeeignet
- pH-Wert optimiert
- dermatologisch getestet
- kristallklar
- vegan

Das Original als Gleit- und Verwöhnigel für individuelle sinnliche Erlebnisse.

neutral: Für alle, die es duftneutral mögen!

Lemongrass: Genieße den frischen, leichten Duft von naturidentischem Zitronengras.

Die zart-pflegende Textur von AQUAglide Gleit + Verwöhnigel ist pH-optimiert, wasserlöslich, ölfrei sowie leicht abwaschbar.



JOYDIVISION international GmbH
Eckenerstrasse 3 · 30179 Hannover
Germany
www.JOYDIVISION.de
sales@JOYDIVISION.de



Amor Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4, 99310 Arnstadt
Germany
www.amor.ag
info@amor.ag

PRRC
Amor Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4, 99310 Arnstadt
Germany
Herr Alfred Praschl
APraschl@amor.ag

JOYDIVISION
...my Lovestyle!

Artikelinformationen

Dieses öl- und fettfreie medizinische Gleitgel auf Wasserbasis ist haut- und schleimhautverträglich, kondomgeeignet und rückstandsfrei mit Wasser abwaschbar. Es ist kein empfängnisverhütendes Mittel und bietet auch keinen Schutz vor Infektionen. Zweckbestimmung: Dieses Medizinprodukt dient zur zusätzlichen Befeuchtung im Intimbereich beim Geschlechtsverkehr, um mechanischen Verletzungen der Haut oder Schleimhaut vorzubeugen, sodass ein Eindringen von Krankheitserregern durch verletzte Stellen verhindert wird. Achtung: Bei Kinderwunsch nicht oder nur sparsam einsetzen, da die Empfängnis erschwert werden könnte. Bei Anwendung mit Kondom das Gleitgel auf das am erigierten Penis abgerollte Kondom auftragen. Lagerung: Kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern.

Anwendung

Gewünschte Menge mit den Fingern im Intimbereich auftragen. Bei der Verwendung mit Kondomen, das Gleitgel außen auf das abgerollte Kondom auftragen.

Reinigung

AQUAglide® ist vollständig mit Wasser abwaschbar. Eintrocknete Rückstände der Bettwäsche können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln fleckenfrei entfernt werden.

Lagerung

Kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern.

Warnhinweise

AQUAglide® ist kein empfängnisverhütendes Mittel, enthält keine spermiziden Wirkstoffe und bietet auch keinen Schutz vor Infektionen. Gynäkologen raten Gleitmittel bei Kinderwunsch nur sparsam einzusetzen, oder wegzulassen, da diese die Empfängnis erschweren könnten.

Kontraindikationen

Bei Allergien oder Reaktion auf bestimmte Inhaltsstoffe, bitte die „Ingredients (INCI)“ beachten. Treten Unverträglichkeiten auf, das AQUAglide® bitte gut abwaschen und gegebenenfalls an den Hausarzt oder Gynäkologen wenden.

Bei weiteren Fragen bitte das JOYDIVISION Team kontaktieren.

Weitere Sprachen in der Gebrauchsanweisung unter:

www.AQUAglide.de



DE UK ES FR NL IT DK GR UA NO PT
PL HU CZ HR SK SI RU AE FA TR

Made with Love
in Europe ★★★★★

Art.-Nr. 11760, 200ml

PZN 16139912
EAN 4028403117602

Ingredients (INCI):

Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Allantoine, Benzoic Acid

Art.-Nr. 11762, 200ml

PZN 16139906
EAN 4028403117626

Ingredients (INCI):

Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Allantoine, Benzoic Acid, Aroma

DE UK ES

| Breite | Tiefe | Höhe |
|---------|--------|---------|
| 4,7 cm | 4,7 cm | 11,8 cm |
| Gewicht | | VPE |
| 267 g | | 16 |

Lagerung

Vor Nässe schützen Vor Hitze und Sonneneinstrahlung schützen



Haltbarkeit nach Anbruch

3 Monate haltbar



Verwendung

Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt wurde



Recycling

Grüner Punkt

Flaschen

