

BD SafeAssist™ Sicherheits-Pen-Nadel

Mit automatischem Schutzschild für eine sichere Insulininjektion

1 Wahl der geeigneten Injektionsmethode

Methode ohne Hautfalte

Die bevorzugte sichere Injektionsmethode für **5-mm-Nadel**; es sei denn, es besteht das Risiko einer intramuskulären Injektion oder die Oberfläche (z. B. weiche Haut) ist zu nachgiebig.



Keine Hautfalte und Injektionswinkel von 90°.



Falscher Winkel.

Methode mit Hautfalte

Bevorzugte sichere Injektionsmethode für **8-mm-Nadel** und für die 5-mm-Nadel, falls das Risiko einer intramuskulären Injektion besteht oder die Oberfläche (z. B. weiche Haut) ist zu nachgiebig.



Breite Hautfalte und Injektionswinkel von 90° (ca. 2,5 cm Haut zwischen den Fingern).



Hautfalte nicht breit genug. Falscher Winkel. **Hinweis:** In manchen Fällen kann es angebracht sein, eine andere Injektionsstelle zu wählen.


2 Vorbereiten für die Injektion



1 Schrauben Sie die Pen-Nadel gerade auf den Pen.



2 Funktionskontrolle: auf 2 Einheiten einstellen, Pen senkrecht nach oben richten, mit dem Daumen den Injektionsknopf drücken. Kontrolle: Ein Insulintropfen muss an der Nadelspitze austreten!

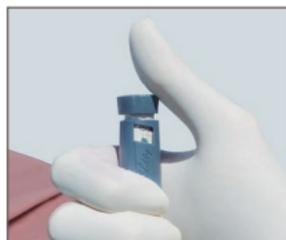

3 Die verordnete Dosis am Pen einstellen. Den Pen zum Einstechen mit der Hand umgreifen – den Daumen ruhen lassen.

BD SafeAssist™ Sicherheits-Pen-Nadel

3 Insulininjektion

- Stechen Sie die Nadel senkrecht in einer gleichmäßigen Bewegung in die Haut, **bis die graue Hülse auf der Haut aufsitzt**.
- Drücken Sie nun den Injektionsknopf mit dem Daumen vollständig durch, um die Dosis zu injizieren.
- Halten Sie die Hülse mit konstantem Druck an die Haut gedrückt – auch nicht die Hand wechseln!
- **Lassen Sie die Nadel für ca. 10 Sekunden in der Haut.**
- Danach den Pen von der Haut abheben.



Hinweis: Nach einer Hautfalten-Injektion zuerst die Nadel abheben und dann die Hautfalte freigeben.

4 Automatischer Schutz



Nach Abheben von der Haut wird der Schild arretiert. Ein **roter Markierungsring** bestätigt, dass die Sicherheitsmechanismen aktiviert wurden.



5 Sichere Nadelentsorgung

Werfen Sie die Nadel in einen Kanülensammelbehälter.

Passt auf ALLE gängigen Insulinpens*

BD SafeAssist™ 0,30 x 5 mm
PZN 15320176 · PHZNR 4353468
Art.-Nr. 329916

BD SafeAssist™ 0,30 x 8 mm
PZN 15320182 · PHZNR 4353474
Art.-Nr. 329917

Packungsgrößen 100 St.

Gehen Sie auf
www.bd.com/bdsafeassist
und schauen Sie sich auch die
animierte Bedienungsanleitung an.



*Stand: Mai 2021

Ab Mai 2017 beziehen sich alle Angaben ausschließlich auf Diabetes-Medikamente und -Medizinprodukte, die derzeit in Deutschland und Österreich lieferbar sind.

BD · Tullastraße 8-12 · D-69126 Heidelberg · Tel. 0800 2323737

bd.com/de

BD, das BD Logo und BD SafeAssist sind Marken der Becton, Dickinson and Company oder der BD-Tochtergesellschaften. © 2017–2020 BD. Alle Rechte vorbehalten. PM 57 1-01/20

