

BARRIER® Beach Chair Schulter Set



- Flüssigkeitsauffangbeutel für effektives Flüssigkeitsmanagement
- Großzügiges All-in-one-Design für Schulteroperationen in der Beach Chair Lagerung/sitzender Position
- Schnelle All-in-One-Lösung, einfach und effektiv von nur einer Person drapierbar
- Die undurchlässigen Materialien verhindern ein Durchnässen und helfen Infektionen vorzubeugen

Hinweise zur Anwendung



1. Zuerst wird das Schlitztuch auf den Patienten aufgelegt.



2. Legen Sie den Schlitz so breit wie möglich um die Schulter des Patienten an.



3. Ziehen Sie die Stockinette an.



4. Entfalten Sie das Abdecktuch einmal, nehmen Sie dann die Hand des Patienten und ziehen Sie sie durch die elastische Manschette.



5. Entfernen Sie die Schutzpapiere und legen Sie den Ausschnitt des Tuchs so hoch wie möglich auf die Schulter. Entfalten Sie das Tuch zuerst an der einen und dann an der anderen Seite.



6. Entfalten Sie das Abdecktuch zunächst in Richtung der Füße des Patienten und dann über den Kopf des Patienten in Richtung Anästhesiebügel.



7. Den Beutel für das Flüssigkeitsmanagement wie gewünscht einstellen. Der Drainageanschluss kann bei Bedarf an den Absaug Schlauch angeschlossen werden.

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60003	Beach Chair Schulter Set 1 Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend 1 Stockinette kurz, 22 x 75 cm 2 OP-Tapes 9 x 49 cm 2 Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm 1 Schulter-Abdecktuch Beach Chair 400 x 240 cm, elastische Manschette 10 x 10 cm 1 Schlitztuch 150 x 193 cm, Schlitz 15 x 61 cm 1 Tischabdecktuch verstärkt 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend	4/8
60004	Beach Chair Schultertuch , 400 x 240 cm, Ausschnitt 10 x 10 cm, elastisch	6/12

Alle angegebenen Komponenten sind auch für eingriffsspezifische Trays von Mölnlycke® erhältlich.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, DEUTSCHLAND, T +49 (0)211 920 880 F +49 (0)211 920 88 170 www.molnlycke.de
 Mölnlycke Health Care GmbH, Wagenseilgasse 14, 1120 Wien, ÖSTERREICH, T +43 1 278 85 42 F +43 1 278 85 42 199 www.molnlycke.at
 Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, SCHWEIZ, T +41 44 744 54 00 F +41 44 744 54 11 www.molnlycke.ch/de-ch/

Die Marken Mölnlycke und BARRIER sowie die Namen und Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Unternehmen der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.
 DEATSUIM001516 Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO: <https://www.molnlycke.de/informationen-zu-dieser-seite/datenschutzrichtlinien/>