



Wunden  
passieren einfach.

octenisept®  
hilft zweifach.

Das ideale Wundversorgungs-DUO

Step 1



+

Step 2



octenisept® 

## Mythen der Wundheilung

### ➤ „Alkohol desinfiziert Wunden am besten“

Alkohol schädigt das Wundgewebe und kann die natürliche Heilung behindern. Eine gute Wunddesinfektion ist schmerz- und alkoholfrei.

### ➤ „Wunden heilen am besten an der Luft“

Es hat sich gezeigt, dass Wunden besser in einer feuchten Umgebung heilen können. So bildet sich keine Kruste, die zu unschönen Narben führen kann.

### ➤ „Eine Wundsalbe ist besser als ein Wundgel“

Salben verhindern durch Ihren okklusiven Effekt, dass Feuchtigkeit in die Wunde ein- und Wundsekret austreten kann. So steigt die Gefahr von Infektionen. Hydrogele sorgen für eine ideal feuchte Wundheilung.

Step 1



Schmerzfremde  
Desinfektion

auch bei chronischen  
Wunden geeignet


Step **2**



**Schnellere Heilung**

auch bei Sonnenbrand geeignet

## Die ideal feuchte Wundheilung

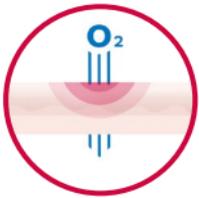


### Atmungsaktiv

Hydrogele schaffen ein sauerstoffdurchlässiges Wundmilieu ohne zu verschließen



### Feuchtigkeitsspendend

Die Wunde wird optimal mit Feuchtigkeit versorgt und das Spannungsgefühl gemindert

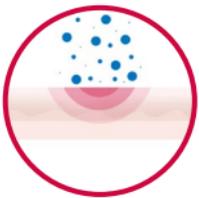

### Schnellere Heilung

Die natürliche Heilung wird beschleunigt und die Narbenbildung reduziert

### Wann sollten Sie einen Arzt konsultieren?



Bei großen und tiefen Wunden, welche stark oder anhaltend bluten. Generell bei ungewöhnlicher oder auffälliger Wundheilung.




## Die einfachen Schritte der Wundversorgung

### Reinigen und Vorbereiten



Wunde unter klarem  
Wasser **reinigen**.

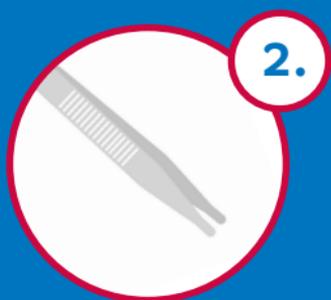

**Fremdkörper** mit einer  
Pinzette **entfernen**.

#### **Fazit:**

Das Duo aus octenisept® Wund-Desinfektion Spray und Begleiter für die ideale Wundversorgung, ob **zu Hause**,



## Desinfizieren und Heilen



Wunden mit **octenisept® Wund-Desinfektion Spray** schnell und schmerzfrei desinfizieren.



**octenisept® Gel** auftragen. Das Gel bildet eine Schutzschicht und schützt so vor Reinfektionen. Die Wundheilung wird beschleunigt und Narbenbildung reduziert.

octenisept® Gel ist der perfekte **unterwegs** oder im **Urlaub**.



# Das Wundversorgungs-DUO

- Schützt aktiv vor einer Infektion
- Schmerzfremie Anwendung
- Schnelle Wirkung
- Für Säuglinge und Schwangere geeignet\*
- Farblos

Step **1**

**Schmerzfremie  
Desinfektion**



\* bitte Packungsbeilage beachten

## Für die ganze Familie\*

- Schützt vor Reinfektionen
- Unterstützt den natürlichen Heilungsprozess
- Hilft Narbenbildung zu reduzieren
- Lindert den Juckreiz
- Farblos



Step **2**

Schnellere  
Heilung



Für weitere Produkt-  
informationen:



Jetzt scannen

Ihre Apotheke:



[www.facebook.com/myschulke](https://www.facebook.com/myschulke)



[www.youtube.com/schuelkeChannel](https://www.youtube.com/schuelkeChannel)

## Kontakt

+49 40 521 00-666  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

## Schülke & Mayr GmbH

22840 Norderstedt | Deutschland  
Telefon | Telefax +49 40 521 00-0 | -318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)

octenisept® 

Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG

**octenisept® Wund-Desinfektion • Anwendungsgebiete:** Antiseptikum zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. **Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.**

901267 | III | 05.22 | C | NaH

Produktinformation wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.