

Aqua bidest (Steriles Wasser)

Spüllösung

Wasser für Injektionszwecke

Zu Reinigungszwecken sowie zur externen Spülung bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen, die eine Spülung bzw. Feuchthaltung nötig machen:

Zum Befeuchten von Tüchern, Tamponaden und Verbandmitteln.

Zum Reinigen von Kathetern und Infusionsgeräten.

Zum Spülen und Reinigen von Geräten.

Nicht für interne Spülungen oder zur Wundspülung verwenden. Dafür sollte auf osmotisch angepasste Spüllösungen zurückgegriffen werden (z.B. Isotonische Kochsalzlösung, Ringer-Lösung).

Hinweis zur Entsorgung: Die Entsorgung nicht verwendeter Produkte oder von Abfallmaterial hat gemäß den spezifischen nationalen Vorgaben zu erfolgen.

Nur klare Lösungen verwenden!

Keine Zusätze mischen.



15526AAE



Nicht wiederverwenden. Unmittelbar nach dem Öffnen verwenden. Nicht-verbrauchte Reste verwerfen.



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden!



Nicht erneut sterilisieren! Kritische Änderungen der Gebrauchstauglichkeit möglich.



Nicht zur Injektion oder Infusion verwenden.

1000 ml



**SERAG
WIESSNER**

SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG
95112 Naila / Deutschland