



CALASEPT-SPEIKO® mit Röntgenkontrast

CE 0482

Zusammensetzung:

Enthält Calciumhydroxid und Bariumsulfat in wässriger Suspension, Calciumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete:

- Versorgung des kariesfreien, pulpanahen Dentins
- Direkte Pulpaüberkappung, auch im Anschluss an eine Pulpotomie
- Temporäre Einlage im Wurzelkanal
- Caries profunda-Behandlung bzw. indirekte Pulpaüberkappung
- Nur für den dentalen Gebrauch

Gegenanzeigen:

- Bei Pulpaeröffnung im kariösen Dentin
- Bei entzündlich veränderter Pulpa
- Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe

Nebenwirkungen/Wechselwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Pulpaüberkappung (direkte und indirekte):

Mit Hilfe der beiliegenden Calasept Kanüle (gebogen) werden kleine Mengen Paste auf einen Anmischblock gegeben und von dort mit einem Instrument auf die eröffnete/freigelegte Pulpa oder auf das pulpanahe Dentin appliziert. Nach der Applikation sollte die Paste durch wasserabsorbierende Materialien (Baumwollpellets oder Papierspitzen) verdichtet werden. Danach wird mit einem Unterfüllungswerkstoff dicht abgedeckt.

Temporäre Einlage im Wurzelkanal:

Wurzelkanal mit Hypochlorit-SPEIKO® 3% oder 5,25% reinigen und mit sterilen Papierspitzen trocknen. Als temporäres Füllungsmaterial für Wurzelkanäle kann CALASEPT-SPEIKO® mit Hilfe z. B. von einem Lentulo direkt in den aufbereiteten Kanal eingebracht werden. Auch mit Hilfe der beiliegenden Einwegkanülen ist eine Applikation der Paste in den Wurzelkanal möglich. Falls erforderlich, kann die Anwendung wiederholt werden. Vor der definitiven Wurzelfüllung sollte CALASEPT-SPEIKO® entfernt werden.

Caries profunda-Behandlung:

Bevor CALASEPT-SPEIKO® in dünner Schicht aufgetragen wird, die Kavität reinigen und trockenlegen. Falls eine dickere Schicht erwünscht ist, schichtweise auftragen. Jede Schicht kurz mit einem sanften Luftstrom trocknen. Anschließend die Unterfüllung und Füllung legen.

Hinweise:

Verwendung der richtigen Kanülen: Um ein Aushärten des Materials zu verhindern, muss die Einwegkanüle in den beiliegenden Gummistopfen gesteckt werden und die gebogene Kanüle mit dem Ziehdraht verschlossen werden.

Verwendung der richtigen Carpulen-Spritze: Wir empfehlen die Verwendung einer nicht-selbstaspirierenden Carpulenspritze. Die für CALASEPT-SPEIKO® verwendete Spritze muss einen gut zentrierten Kolben haben, der nicht seitlich bewegbar ist. Spritzen mit Aspirationshaken oder V-förmige Kolben dürfen nicht verwendet werden.

CALASEPT-SPEIKO® darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.

Lagerung bei Raumtemperatur.

Handelsform:

CALASEPT-SPEIKO® Inhalt: 2 x 2,5 g Art.-Nr. 1005
Zubehör: 3 Einwegkanülen und 1 gebogene Kanüle

Stand der Information: Januar 2017