

GSE EAR DROPS FREE

Ohrentropfen bei **schmerzhaften und entzündlichen Symptomen der Gehörgangentzündung (Otitis externa)** sowie zur mechanischen Entfernung von Ohrenschmalzpfropfen.

Dank der physikalischen Wirkung des pflanzlichen Glycerins zusammen mit Grapefruitkernextrakt, der für ein mikrobiologisch kontrolliertes Milieu im äußeren Gehörgang sorgt, ermöglicht **GSE Ear Drops Free** mit aufweichender und hautschützender Wirkung eine Linderung der für eine Gehörgangentzündung (Otitis externa) charakteristischen Symptome wie Schmerzen, Rötung, Schwellung und Sekretabsonderung. Die Extrakte von Rosskastanie und schwarzer Johannisbeere tragen zur Verbesserung der Symptome bei, indem sie für eine rasche und anhaltende Linderung sorgen. Der hohe Gehalt an hygroskopischem Glycerin begünstigt den mechanischen Abtransport eventueller im Gehörgang eingeschlossener Wasserreste und beugt so mikrobiellen Verunreinigungen vor, die ein Auftreten von Bade-Otitis verursachen können. Die Anwendung des Präparats hilft außerdem bei der Entfernung von Ohrenschmalzpfropfen.

ZUSAMMENSETZUNG

Pflanzliches Glycerin, Grapefruitkernextrakt (*Citrus x paradisi*), Extrakt der Rosskastanie (*Aesculus hippocastanum*), Extrakt der schwarzen Johannisbeere (*Ribes nigrum*).

OHNE KONSERVIERUNGSMITTEL - FÜR VEGANER GEEIGNET

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bei Bedarf den Kopf zur Seite neigen und (3-4-mal täglich) 1-2 Tropfen direkt in den Gehörgang träufeln; einige Minuten lang in dieser Position bleiben und, falls notwendig, beim anderen Ohr wiederholen. Die Pipette nach dem Öffnen innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.



WARNHINWEISE

Nur zur Anwendung im Ohr. Spezielle Untersuchungen zur Zytotoxizität im Ohr haben ergeben, dass das Präparat auch bei Trommelfellperforation angewendet werden kann. Bei Raumtemperatur und nicht in der Nähe von Wärmequellen aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um einem unsachgemäßen Gebrauch vorzubeugen. Die Anwendung durch Kinder hängt von deren Fähigkeit zur korrekten Verwendung der Pipetten ab; die Verabreichung durch Kinder muss daher durch einen Erwachsenen überwacht werden. Nicht verwenden, wenn das Produkt bei der ersten Öffnung beschädigt oder nicht richtig verschlossen ist. Das Produkt darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem oder mehreren der Bestandteile nicht angewendet werden. Wenn während der Anwendung Beschwerden auftreten, die Behandlung abbrechen und einen Arzt aufsuchen. Den Behälter nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen.



GSE EAR DROPS FREE
ist ein Medizinprodukt

10 wiederverschließbare Pipetten

0,3 ml e



ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Gebrauchsanweisung
beachten



Bei beschädigter
Verpackung nicht verwenden



Füllmenge



Verfalldatum



Vor Licht schützen



Katalognummer



Chargennummer



Nicht in die Umwelt
gelangen lassen



Hersteller



PRODECO PHARMA Srl Unipersonale

Via G. Toniolo, 25/1 - 31033 Castelfranco V.to (TV) Italia

Vertrieb Prodeco Pharma Deutschland GmbH
Linprunstraße, 49
D-80335 München