

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch - sie enthält wichtige Informationen für die Anwendung des Produktes. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker, Arzt oder Kontaktlinsenspezialisten oder setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung.

Oxyal®

DR. WINZER

0,15 % Hyaluronsäure (als Natriumhyaluronat), 0,5 % Polyethylenglykol 8000 (PEG 8000), Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Magnesiumchlorid, Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke, Borsäure und Oxyd®

Zweckbestimmung: Zur Augenbefeuchtung sowie zum Benetzen von weichen und harten Kontaktlinsen

Was ist Oxyal®?

Oxyal® ist eine klare Augentropfenlösung, die 0,15 % Hyaluronsäure (als Natriumhyaluronat), 0,5 % Polyethylenglykol 8000 (PEG 8000), Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Magnesiumchlorid, Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke, Borsäure und Oxyd® (ein sanftes Konservierungsmittel, das an der Augenoberfläche in Wasser, Sauerstoff und Salz umgewandelt wird) enthält.

Oxyal kann nach dem ersten Öffnen 8 Wochen lang verwendet werden.

Wofür wird Oxyal® angewendet?

Oxyal® wird zur Befeuchtung der Augenoberfläche und zur Linderung von Symptomen des Trockenen Auges eingesetzt.


Oxyal® eignet sich für alle weichen und harten Kontaktlinsen während des Tragens und erhöht dadurch spürbar den Tragekomfort der Kontaktlinsen, den ganzen Tag lang.

Wie häufig und wie lange ist Oxyal® anzuwenden?

Tropfen Sie je nach Bedarf 1 Tropfen Oxyal® in das Auge. Oxyal® kann täglich und so oft wie nötig angewendet werden. Die Anwendungsdauer ist nicht begrenzt.

Wie ist Oxyal® anzuwenden?


Die Abbildungen zeigen Ihnen die einfache Anwendung von Oxyal®.

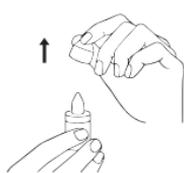

1. Waschen Sie Ihre Hände bevor Sie das Produkt anwenden. Entfernen Sie vor jeder Anwendung die Schutzkappe der Flasche. Vermeiden Sie den Kontakt der Flaschenspitze mit Ihrem Auge oder Ihren Fingern, um eine mögliche Verunreinigung der Lösung zu verhindern.



2. Legen Sie Ihren Kopf leicht nach hinten, ziehen Sie Ihr unteres Augenlid mit einem Finger Ihrer freien Hand leicht nach unten und halten Sie die Flasche vertikal mit der Flaschenspitze nach unten zeigend über Ihr Auge. Drücken Sie anschließend vorsichtig einen Tropfen aus der Flasche.

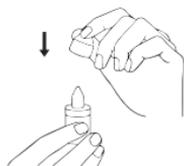

3. Setzen Sie die Kappe nach jedem Gebrauch wieder auf die Flasche.

Wann darf Oxyal® nicht angewendet werden?

Wenden Sie das Produkt nicht an, wenn Sie überempfindlich auf einen der Inhaltsstoffe reagieren.

Wichtige Informationen zur Anwendung von Oxyal®

- In sehr seltenen Fällen können lokale Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. In diesen Fällen muss die Behandlung beendet werden. Wenn anhaltendes Unbehagen oder Irritationen auftreten, brechen Sie die Anwendung des Produkts ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Berühren Sie die Augenoberfläche nicht mit der Flaschenspitze, um eine mögliche Verletzung der Augenoberfläche oder eine Verunreinigung der Lösung zu vermeiden.
- Berühren Sie die Flaschenspitze nicht mit den Fingern, um eine mögliche Verunreinigung der Lösung zu vermeiden.
- Geben Sie die Flasche nach dem Öffnen nicht an andere Personen für deren Gebrauch weiter.
- Bei gleichzeitiger Anwendung eines weiteren Augenpräparates sollten Sie ca. 15 Minuten warten, bevor Sie das andere Produkt anwenden.
- Entsorgen Sie das Medizinprodukt 8 Wochen nach dem Öffnen.
- Nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.
- Flasche vor dem ersten Gebrauch auf Unversehrtheit prüfen. Nicht verwenden, wenn die Flasche beschädigt ist.
- Oxyal® enthält Kleinteile aus Plastik, die von Kindern verschluckt werden könnten. Erstickungsgefahr. Daher muss Oxyal® für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.
- Für die Anwendung dieses Produkts ist keine spezielle Schulung erforderlich.
- Dieses Produkt enthält Borsäure. Eine Sicherheitsbewertung von Borsäure und Natriumborat kommt zu dem Schluss, dass sie in den in diesem ophthalmischen Produkt enthaltenen Konzentrationen nicht schädlich sind.
- Nach derzeitigem Kenntnisstand kann dieses Produkt bei schwangeren Frauen, stillenden Müttern und Kindern eingesetzt werden.
- Wenn Ihr Kind unter trockenen Augen leidet, sprechen Sie vor der Anwendung eines Augenbefeuchtungsmittels mit einem Arzt.

Lagerung: Bei einer Temperatur zwischen +2 °C und +25 °C lagern

Entsorgung: Das Produkt ist entsprechend den örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.

In Verbindung mit dem Produkt auftretende schwerwiegende Vorfälle sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

CE 0483 Konformitätsbewertungsverfahren nach EU
Medizinprodukterichtlinie
CE Zeichen mit Nummer der Benannten Stelle

 Hersteller: Dr. Gerhard Mann
chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165/173
13581 Berlin, Deutschland

Vertrieb:
Dr. Robert Winzer Pharma GmbH
Brunsbütteler Damm 165/173
13581 Berlin, Deutschland
E-Mail: winzer@bausch.com



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden



Das Medizinprodukt 8 Wochen nach dem ersten Öffnen entsorgen.



Verwendbar bis



Gebrauchsanweisung beachten



Fertigungslosnummer, Charge



Sterilisiert mit aseptischen Verfahren und verpackt in einem einfachen Sterilbarriersystem



Temperaturbegrenzung



Einmalige Produktkennung
GTIN (01) Produktkennung
EXP (17) Verwendbar bis (Format: JJMMTT)
LOT (10) Chargenbezeichnung



Medizinprodukt



Herstellungsdatum



Enthält Gefahrstoffe (enthält Borsäure)



Achtung (wichtige Warnhinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung)

Ausgabedatum: Oxyal[®], I981EU-5, 2023-07

Oxyal[®] ist ein Warenzeichen von Bausch & Lomb oder einer seiner Tochtergesellschaften.

© 2023 Bausch & Lomb Incorporated oder einer seiner Tochtergesellschaften