



SPEIKOSEPT CHX 2 %

Zusammensetzung: Lösung enthält 2% Chlorhexidindigluconat

Anwendungsgebiete:

Zur Reinigung kontaminierter Wurzelkanalinstrumente während der Wurzelkanalbehandlung.

Dosieranleitung, Hinweise zur Anwendung:

Eine ausreichende Menge der Lösung in ein geeignetes Gefäß (Arbeitsständer für Endofeilen) geben. Die gebrauchten Instrumente werden nach der Verwendung in die Lösung eingebracht. Aufgrund der bakteriziden Wirkung des Chlorhexidindigluconats ist von einer raschen Keimzahlverminderung auszugehen.

Die Speikosept CHX 2 % - Lösung dient nachweislich hervorragend zur Eliminierung des Endokeims *Enterococcus faecalis* (Keimverminderung um 99%).

Der Tensidzusatz des Produkts gewährleistet eine rasche und vollständige Ablösung behandlungsbedingter Rückstände vom Instrument. Ein Abspülen der Instrumente ist nicht erforderlich. Vor der Sterilisation empfiehlt sich eine weitere Aufbereitung der Instrumente.

Hinweise:

Dieses Medizinprodukt darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

Nach Gebrauch Flasche wieder dicht verschließen und bei Raumtemperatur lagern. Unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Handelsform:

Flüssigkeit:	Inhalt 30 ml,	Artikel-Nr.: 1056
	Inhalt 100 ml,	Artikel-Nr.: 1070

Stand: April 2011

SPEIKO® - Dr. Speier GmbH Postfach 7204 D-48039 Münster
Telefon +49 (0)251 78904-0 Telefax +49 (0)251 78904-22 E-Mail: info@speiko.de www.speiko.de

Printed in Germany - Imprimé en Allemagne