



Systane[®] ULTRA

BENETZUNGSTROPFEN FÜR DIE AUGEN

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation sorgfältig durch, und bewahren Sie sie auf, um sie später noch einmal nachlesen zu können.

BESCHREIBUNG:

SYSTANE[®] ULTRA Benetzungstropfen für die Augen sind eine sterile Lösung, die Polyethylenglykol 400, Propylenglykol, Hydroxypropyl-Guar, Sorbitol, Aminomethylpropanol, Borsäure, Kaliumchlorid, Natriumchlorid und das Konservierungsmittel POLYQUAD[®] (Polidroniumchlorid) 0,001% enthält.

STERILE A

ANWENDUNGSGEBIETE

SYSTANE[®] ULTRA sind Benetzungstropfen zur Therapie Trockener Augen.

SYSTANE[®] ULTRA Benetzungstropfen für die Augen lindern die Symptome des Trockenen Auges wie Brennen und Irritationen.

SYSTANE[®] ULTRA Benetzungstropfen für die Augen können zur Befeuchtung und Nachbenetzung von Kontaktlinsen verwendet werden. Sie sind geeignet für Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen und alle weichen (hydrophilen) Kontaktlinsen wie Tageslinsen, Monatslinsen und Dauertragelinsen.

SYSTANE[®] ULTRA Benetzungstropfen für die Augen befeuchten Ihre Kontaktlinsen, reduzieren Tragekomfortstörungen und helfen Irritationen zu vermeiden.

EC REP

GEGENANZEIGEN (Gründe gegen eine Anwendung):

Wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe von **SYSTANE[®] ULTRA Benetzungstropfen für die Augen** allergisch sind, sollten Sie dieses Produkt nicht verwenden.

ANWENDUNGSHINWEISE:

SYSTANE® ULTRA Benetzungstropfen für die Augen können täglich nach Bedarf angewendet werden. Geben Sie ein bis zwei Tropfen in das betroffene Auge und blinzeln Sie.


Vor Gebrauch schütteln.

Nehmen Sie **SYSTANE® ULTRA Benetzungstropfen für die Augen** und legen Sie einen Spiegel bereit.

Waschen Sie Ihre Hände.

Öffnen Sie die Flasche, ohne die Tropferspitze zu berühren. Halten Sie die Flasche zwischen Daumen und Fingern mit der Öffnung nach unten.


Legen Sie den Kopf zurück. Ziehen Sie das untere Augenlid mit dem Zeigefinger nach unten, bis zwischen Augenlid und Auge eine Art Tasche entsteht. Tropfen Sie hier ein.

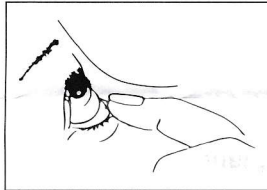

Führen Sie dazu die Tropferspitze der Flasche dicht an Ihr Auge. Bei Bedarf benutzen Sie den Spiegel.

Um eine Verunreinigung der Augentropfen zu vermeiden, dürfen Behälter und Tropferspitze nicht mit dem Auge, den Augenlidern oder deren Umgebung in Berührung kommen.

Schauen Sie nach oben und tropfen Sie durch leichten Druck auf den Flaschenboden der Drop-Tainer-Flasche einen Tropfen in den Bindehautsack.

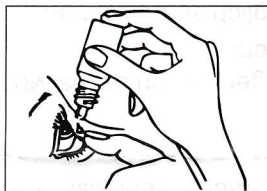

Wenn Sie die Augentropfen in beiden Augen anwenden, wiederholen Sie die Schritte am anderen Auge.

Halten Sie die Flasche fest verschlossen, wenn sie nicht benutzt wird.

Während des Tragens von Kontaktlinsen, bei leichten Irritationen, gestörtem Tragekomfort und Verschwommensehen geben Sie ein bis zwei Tropfen in das betroffene Auge und blinzeln Sie.

SYSTANE® ULTRA Benetzungstropfen für die Augen können ebenso vor und nach dem Tragen von Kontaktlinsen angewendet werden.

Vor Gebrauch schütteln.

WARNHINWEISE:

Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers und die Packungshinweise zur korrekten Anwendung des Produktes beachten. Wenn es zu anhaltenden Augenbeschwerden, übermäßigem Tränenfluss, Sehveränderungen oder Augenrötung kommt, suchen Sie Ihren Arzt oder Apotheker auf, da sich die Beschwerden verschlimmern könnten.

Reinigen oder desinfizieren Sie Ihre Kontaktlinsen nicht in

SYSTANE® ULTRA Benetzungstropfen für die Augen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Vermeiden Sie jedes Berühren der Tropferspitze der Flasche oder deren Kontakt mit Gegenständen, um Verunreinigungen zu verhindern.
- Nach Gebrauch wieder verschließen.
- Flasche bei Nichtgebrauch stets fest verschlossen halten.
- Vor dem auf Packung und Flasche angegebenen Verfalldatum verwenden. ☒
- Restmengen der Augentropfen sechs Monate nach Anbruch der Flasche verwerfen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nicht über 30°C lagern. ↴ 30°C

PACKUNGSGRÖSSEN:

SYSTANE® ULTRA Benetzungstropfen für die Augen werden durch eine Kombination aus Dampfsterilisation und Sterilfiltration sterilisiert und sind in Plastikflaschen zu 10 ml und 3 x 10 ml erhältlich.

STERILE A

VERTRIEB für Deutschland

Alcon Pharma GmbH
Blankreutestraße 1
79108 Freiburg

VERTRIEB für Österreich

Alcon Ophthalmika GmbH
Stella-Klein-Löw-Weg 17
1020 Wien

EC REP

Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley Camberley
Surrey, GU16 7SR
Vereinigtes Königreich

