

420326A



DE MIKROADHÄSIVE WUNDAUFLAGE MIT POLYABSORBIERENDEN FASERN

PRODUKTBESCHREIBUNG

UrgoClean ist eine Innovation der Laboratoires URGO in Form einer sterilen Vlieskomresse aus hochabsorbierenden und kohäsiven polyabsorbierenden Fasern (Polyacrylat). Diese Innovation beruht darauf, die Polyacrylatfasern in einer parallel zur Wunde verlaufenden Ebene durch Thermostanzung strukturell miteinander zu verbinden, wodurch UrgoClean seine spezifischen Eigenschaften erhält:
-Absorbieren und einschließen von fibrinösen Belägen und Wundexsudat
-Hohe Zugfestigkeit

Die polyabsorbierenden Fasern der UrgoClean Komresse sind mit einer mikroadhäsiven TLC-Wundheilungsmatrix (Technology LipidoColloid) beschichtet, die leicht ein Gel bildet und auf diese Weise die Ableitung (Drainage) von fibrinösen Belägen sowie die Positionierung und das Ablösen der Wundauflage erleichtert.

WIRKMECHANISMUS

- In Kontakt mit dem Wundexsudat bilden die Lipidokolloidpartikel der TLC-Wundheilungsmatrix ein Gel, welches für ein feuchtes, die Wundreinigung begünstigendes Milieu sorgt.
- Gleichzeitig bilden die polyabsorbierenden Polyacrylatfasern ein Gel, binden fibrinöse Beläge, absorbieren diese und leiten sie in die Faserstruktur ab (autolytische Wundreinigung).
- Infolgedessen wird durch die Fixierung und Drainage der fibrinösen Beläge aufgrund der polyabsorbierenden Struktur von UrgoClean in Verbindung mit der TLC-Wundheilungsmatrix die Reinigung fibrinöser Wunden begünstigt.

EIGENSCHAFTEN

- Absorption der Exsudate, Gelbildung und Drainage der fibrinösen Geweberückstände in der Reinigungsphase
- Absorption und Einschließen von Bakterien durch die Struktur der polyabsorbierenden Polyacrylatfasern

- In Kontakt mit der Wunde Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus, das die Wundheilung der gereinigten Wundbereiche begünstigt
- Erleichterte Kontrolle schwacher Blutungen
- Ablösen der Wundauflage in einem Stück dank der Zugfestigkeit der polyabsorbierenden Fasern
- Atraumatisches und schmerzfreies Ablösen der Wundauflage sowie Schutz der Wundumgebung dank der mikroadhäsiven TLC-Wundheilungsmatrix.

INDIKATIONEN

UrgoClean ist unmittelbar ab der Reinigungsphase für exsudierende, chronische Wunden (Unterschenkelulzera, Druckulzera, Diabetische Fußulzera, unter anderem Malum perforans) und potentiell fibrinöse Wunden wie akute Wunden (Verbrennungen, Hautabschürfungen, traumatische Wunden), postoperative Wunden und tumorbedingte Wunden geeignet.

HINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG

1 – Vorbereitung der Wunde:
- Die Wunde nach dem üblichen Pflegeprotokoll reinigen und mit steriler physiologischer Kochsalzlösung spülen.
- Falls zuvor ein Antiseptikum verwendet wurde, ist die Wunde vor der Anwendung von UrgoClean sorgfältig mit steriler physiologischer Kochsalzlösung zu spülen.
- Die Verwendung von UrgoClean schließt eine mechanische Reinigung nicht aus, sofern diese notwendig ist.
2 – Auflegen des Verbandes:
- Die Schutzfolien von der mikroadhäsiven Seite abziehen.
- Die mikroadhäsive Seite von UrgoClean direkt auf die Wunde und ihre Unebenheiten auflegen.
Falls notwendig kann UrgoClean mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden, um die Größe der Wundauflage an die Wunde anzupassen.

- UrgoClean mit einem an die Lokalisation und den Exsudationsgrad der Wunde angepassten Sekundärverband abdecken.

3 – Verbandwechsel:
UrgoClean sollte während der Reinigungsphase der Wunde alle 1 bis 2 Tage gewechselt werden, danach sollte die Häufigkeit der Verbandwechsel an das Volumen des Wundexsudates und an die klinische Entwicklung der Wunde angepasst werden (maximale Tragedauer 7 Tage). Nicht verwendete Reste von UrgoClean gemäß den lokal geltenden Vorschriften entsorgen.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Die mikroadhäsive TLC-Matrix von UrgoClean haftet an chirurgischen Handschuhen aus Latex. Deshalb wird empfohlen, beim Umgang mit der Wundauflage den Kontakt mit der beschichteten Seite zu vermeiden oder sterile Pinzetten zu verwenden.
- Die gleichzeitige Anwendung einer Creme, einer Salbe oder einer Emulsion wird nicht empfohlen.
- Während der Reinigungsphase kann es, bedingt durch die fortschreitende Beseitigung von fibrinösem Gewebe, zu einer Vergrößerung der Wunde kommen.
- Aufgrund ihrer nicht okklusiven Eigenschaften kann UrgoClean unter strenger medizinischer Überwachung auch bei infizierten Wunden angewendet werden.
- UrgoClean darf nicht in einer Überdruck-Kammer angewendet werden.
- Die Wundauflage nicht erneut sterilisieren.
- Vor der Anwendung die Unversehrtheit der sterilen Einzelverpackung überprüfen. Die Wundauflage nicht verwenden, wenn die sterile Einzelverpackung beschädigt ist.
- Sterile Einzelverpackung nur zum Einmalgebrauch bestimmt: Die Wiederverwendung einer zum Einmalgebrauch bestimmten Wundauflage kann Infektionsrisiken verursachen.

KONTRAINDIKATIONEN

-Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen UrgoClean oder einen der Bestandteile.
-UrgoClean nicht als chirurgische Komresse bei stark blutenden Wunden anwenden.

Vertrieb in Deutschland: URGO GmbH;
Justus-von-Liebig-Str. 16;66280 Sulzbach

CE 0459 (2011)

IFU (2017-05)

STERILE R



Made in France
Laboratoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France

LABORATOIRES URGO - SERVICE PACKAGING BATIMENT 20 - 42 RUE DE LONGVIC - 21300 CHENÔVE	
LABORATOIRES URGO	
DÉSIGNATION DE L'ARTICLE :	DIMENSIONS :
IFU URGOCLEAN-DE/NL Recto	150 x 280 mm 50-45 Corps 09
IMPRESSION 1 COULEUR :	CODE ARTICLE :
	420326 VERSION A
	DATE DE RÉALISATION :
	25/04/2017 FRS 2
VISA CHEF PRODUIT :	DATE DE VALIDATION :
NOM : C. BARRAULT	16/05/2017
DATE : /05/2017	FRS

CETTE ÉPREUVE COULEUR EST
UTILISÉE UNIQUEMENT POUR
LE POSITIONNEMENT DU TEXTE,
CODE À BARRES ET ILLUSTRATION.
THIS COLOR PRINT IS ONLY USED FOR THE TEXT,
BARCODE AND PICTURE POSITIONNING.

Madame, Monsieur
Merci de nous envoyer 5 jeux de triptyques
concernant cette référence
Dear Madam, dear sir,
Thanks to send us 5 sets of triptych
concerning this item. Best regards.

