

Mepore® Film Roll

Unsteriler, transparenter Folienverband auf der Rolle

Kunststoffseele

- Für optimalen Schutz während der Lagerung, einfach in der Handhabung

- Längenmarkierte Schutzfolie für einfaches und wirtschaftliches Zuschneiden



- Hoch atmungsaktive, transparente Folie verringert das Risiko von Mazeration

- Viren- und bakterienundurchlässige* Folie, duschfest

- Hautfreundlicher Kleber für sichere Fixierung und Patientenkomfort



* (Mikroben > 25nm)

Mepore Film Roll ist ein unsteriler, transparenter Folienverband auf der Rolle, der sich ideal für die Fixierung von Verbänden, Tuben und Kanülen eignet. Außerdem kann Mepore Film Roll zur Vorbeugung von Hautschäden, als Schutz fragiler Haut, sowie zum Schutz vor Kontamination eingesetzt werden.

Anwendungshinweise



Ziehen Sie zuerst die Schutzfolie mit der Kennzeichnung „1“ ab.



Applizieren Sie Mepore Film Roll. Glätten Sie den Film fest auf der Haut, um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten.



Entfernen Sie den unterstützenden Film, indem Sie die Markierung „2“ anheben.



Entfernen Sie den weißen Papierstreifen.

Eigenschaften von Mepore® Film Roll

Mepore Film Roll bietet eine flexible und transparente Abdeckung zum Schutz fragiler Haut und passt sich unterschiedlichen Körperkonturen an. Die viren- und bakterienundurchlässige Folie bietet Schutz vor äußerer Kontamination. Mepore Film Roll ist einfach in der Anwendung und eignet sich besonders für die Fixierung von Verbänden, Tuben und Kanülen. Mepore Film Roll ist wasserdampfdurchlässig und ermöglicht die Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus. Gleichzeitig wird überschüssige Feuchtigkeit von Wunde und der wundumgebenden Haut abgeleitet.

Vorteile von Mepore® Film Roll

- Hoch atmungsaktive, transparente Folie verringert das Risiko von Mazeration
- Hautfreundlicher Kleber für sichere Fixierung und Patientenkomfort
- Transparente Folie erlaubt regelmäßige Wundkontrolle und Erkennung von Komplikationen
- Viren- und Bakterienundurchlässige* Folie bietet Schutz vor äußerer Kontamination
- Duschfest für Patientenkomfort
- Dünne und flexible Folie passt sich ausgezeichnet an unterschiedlichen Körperkonturen an
- Einfache Anwendung und erhöhter Patientenkomfort
- Längenmarkierte Schutzfolie für einfaches und wirtschaftliches Zuschneiden
- Praktische Kunststoffseele für optimalen Schutz während der Lagerung, einfach in der Handhabung

Anwendungsgebiete

Mepore Film Roll kann als Fixierung von Verbänden, Tuben und Kanülen eingesetzt werden. Außerdem kann Mepore Film Roll zur Vorbeugung von Hautschäden, als Schutz fragiler Haut, sowie zum Schutz vor Kontamination eingesetzt werden.

Hinweis

Mepore Film Roll sollte nicht bei Patienten verwendet werden, die sensibel auf acrylathaltige Kleber reagieren.

Bestellinformationen

Home Care & Klinik

Art.-Nr.	Größe	PZN/ Packung	Stück/ Packung
27 61 05	5 cm x 10 m	05 54 35 73	1
27 61 10	10 cm x 10 m	05 54 35 96	1
27 61 15	15 cm x 10 m	05 54 36 04	1

Unsteril – im Spenderkarton



Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170. Mölnlycke® und das Produkt Mepore® Film Roll sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
© 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0043


Mölnlycke®