

○ Sitzring rund aufblasbar aus Gummi; ohne Pumpe

- Kann durch Veränderung des Luftdruckes den Sitzbedürfnissen individuell angepasst werden.
- Leicht zu reinigen.
- Bei vielen Beschwerden einsetzbar.
- Hygienische Verwendung; u.a. bei Toilettenstühlen oder Toiletten-Brillen.

Unser Sitzring/Sitzkissen wird aus hochwertigem und schwer entflammbarem Naturkautschuk-Material hergestellt.

Durch das Spezial-Ventil kann der Ring / das Kissen problemlos mit dem Mund auf die gewünschte Festigkeit aufgeblasen werden. Zum Aufblasen:

Ventil öffnen > nach links drehen > aufpumpen + Ventil schließen wieder nach rechts zudrehen!

Hierdurch entfällt das lästige Mitnehmen und Suchen nach einer Pumpe.

Das Mundstück des Ventils kann nach dem Gebrauch mit einem Desinfektionstuch leicht gereinigt werden, da es aus Metall ist.

Pumpe zum Aufblasen: siehe Artikel-Nr. 70707N

Techn. Daten:

○ Art. 04002OP / PZN: 10961143 D= ca. 40 cm * **X** Art. 04003OP / PZN: 10961166 D= ca. 43 cm



○ Art. 04022OP / PZN: 10961172 D= ca. 45 cm * ○ Art. 04023OP / PZN: 10961189 D= ca. 50 cm



○ Bidet / Sitzbad aufblasbar aus Gummi (ohne Pumpe)

Art.-Nr. 70805OP / PZN: 03075837

Leicht zu reinigen.

Bei vielen Beschwerden einsetzbar.



Es ermöglicht höchstmögliche Wirkung der Essenzen bei Sitzbädern durch größere Wasseroberfläche.

Hygienische Verwendung, da das Pflegen der unteren Extremitäten von vorne leicht möglich ist.

Unser Bidet wird aus hochwertigem und schwer entflammbarem Naturkautschuk-Material hergestellt.

Techn. Daten:

Gesamt-Abmessung: ca. 27/37 x 47/50 cm

*

Öffnungs-Maße:

ca. 8/12 x 25 cm

Pumpe zum Aufblasen: siehe Artikel-Nr. 70707N

Vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung schützen!

Reinigung mit leichter Seifenlauge vornehmen! Keine Haushaltsreiniger verwenden!

Gebrauchshinweise


Handpumpe

Art.-Nr. 70707N

(1)




Ventilnippel zum Öffnen etwas nach links drehen

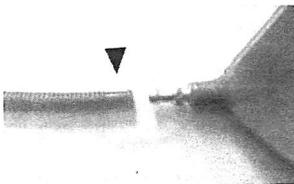


Blauen Verbindungsschlauch (Muffenteil) auf den Nippel schieben

(2) (3)

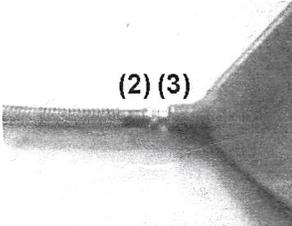

Gegenseite des blauen Verbindungsschlauches auf den Konus am Blasebalg schieben,

(4)

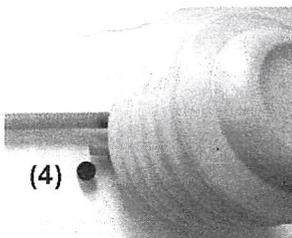

die Abdeckkappe (4) rechts daneben abnehmen und mit dem Pumpvorgang beginnen, bis das Gummiteil ausreichend mit Luft gefüllt ist. Schlauch (2) am Ventilnippel leicht festhalten und Metallnippel (3) wieder nach rechts zudrehen. Erst dann blauen Verbindungsschlauch abnehmen, da sonst Luft entweicht.

Zum Luftablassen den Ventilnippel (1) nach links drehen.



Zubehör:
2 weiße Verbindungskonen
für andere Artikel

20150520kk