



STIFT GEGEN WARZEN

ZUR ENTFERNUNG VON WARZEN AUSSCHLIESSLICH AN HÄNDEN UND FUSSSOHLEN



DER STIFT GEGEN WARZEN DIENT ZUM EINFACHEN, SCHNELLEN UND WIRKSAMEN ENTFERNEN VON GEWÖHNLICHEN WARZEN UND DORNWARZEN BEI SICHERER ANWENDUNG. GEEIGNET FÜR KINDER AB 4 JAHREN. LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM DURCH UND VERMEIDEN SIE EINEN UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH DES WARTNER STIFTS GEGEN WARZEN.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZU WARZEN

Warzen sind harmlose Wucherungen auf der Haut, die durch humane Papillomaviren (HPV) ausgelöst werden. Es gibt verschiedene Arten von Warzen. Die häufigsten sind jedoch die sogenannten gewöhnlichen Warzen. Sie bestehen aus einem Kern inneren Gewebes, der von Blutgefäßen versorgt und von äußeren Hautgewebeschichten bedeckt wird. Gewöhnliche Warzen sind durch ihr raues, blumenkohlartiges Aussehen leicht zu erkennen. Dornwarzen ähneln gewöhnlichen Warzen, treten jedoch hauptsächlich auf den Fußsohlen, Fersen oder Zehen auf.

Warzen & Fußwarzen treten bei 7 bis 10 % der Gesamtbevölkerung auf. Sie sind sehr ansteckend und können bei einem schwachen Immunsystem häufiger auftreten. Durch direkten Kontakt mit der infizierten Stelle können sie von einer Person auf die andere bzw. von einer Körperstelle auf eine andere übertragen werden. Über 50 % der Warzen verschwinden ohne Behandlung innerhalb von zwei Jahren. Allerdings entscheiden sich viele gleich beim ersten Auftreten der Warze für eine Behandlung, denn diese können unschön aussehen oder im Fall von Fußwarzen schmerzhaft sein.

Traditionell gibt es zwei Hauptbehandlungsmethoden bei Warzen und Fußwarzen. Zum einen sind dies säurebasierte Flüssigkeiten, die direkt auf die Warze bzw. Fußwarze aufgetragen werden. Zweitens können Warzen ausgebrannt oder durch eine Laser- oder Kältebehandlung entfernt werden. Dies kann durch medizinisches Fachpersonal erfolgen oder Sie können zu Hause selbst eine Kältebehandlung (Wartner Vereisungsmethode) durchführen.

Der Wartner® Stift gegen Warzen ist eine wirksame und einfach anzuwendende Alternative für zu Hause und beinhaltet eine hochkonzentrierte Lösung zur Entfernung von Warzen.

WARNHINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

Trichloressigsäure ist eine stark ätzende Säure.

- Nicht für Kinder unter 4 Jahren geeignet.
- Die Anwendung bei Diabetespacienten und Personen mit Durchblutungsstörungen wird nicht empfohlen.
- Ausschließlich für das Entfernen von Warzen an Händen und Fußsohlen verwenden.
- Ein Stift darf nur für eine Person verwendet werden.
- Nur zur äußeren Anwendung auf Händen und Fußsohlen. Nicht auf anderen Körperteilen anwenden.
- Nicht auf offenen Wunden oder gesunder oder gereizter Haut verwenden.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich um eine Warze handelt, nicht anwenden.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgen Sie den Stift in folgenden Fällen:

- Die Verpackung oder das Produkt ist beschädigt.
- Die Spitze des Stifts bricht beim erstmaligen Drehen der Verschlusskappe nicht.
- Beim Drücken des blauen Knopfs ist kein deutliches Klicken zu hören.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Hautarzt wenn:

- Das Produkt in Kombination mit anderen Behandlungen verwendet wird.
- Nebenwirkungen oder andere allergische Reaktionen auftreten.
- Die Symptome nach einem Behandlungszeitraum von 6 Wochen sich nicht verbessert haben.
- Sie schwanger sind oder stillen.

Entsorgen Sie das Produkt gemäß internationalen und nationalen Vorschriften für Abfallentsorgung.

Bewahren Sie diese Gebrauchsinformation auf. Sie enthält wichtige Informationen.

Vermeiden Sie den Kontakt von der TCA-Lösung mit gesunder Haut und den Augen. Bei Kontakt die Lösung sofort mit einem trockenen Wattestäbchen abwischen, um das Abschälen gesunder Haut zu vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen, spülen Sie diese für 15 Minuten und holen Sie sofort ärztliche Hilfe ein.

ANWENDUNG




Drehen Sie vor der Erstanwendung die blaue Kappe 3-mal um 360°. Wenn Sie diesen Schritt nicht durchführen, wird der Stift nicht aktiviert und ist nicht funktionstüchtig.



Klopfen Sie mit dem Stift (blaue Kappe zeigt nach unten) 3-mal auf eine flache Oberfläche, damit die Flüssigkeit in die vordere Spitze des Stifts fließen kann.



Bringen Sie die Noppe der blauen Kappe auf eine Linie mit der Noppe des weißen Stifts. Da die Kappe hinderlich ist, kann es sein, dass beim Öffnen des Stifts etwas Kraft benötigt wird.

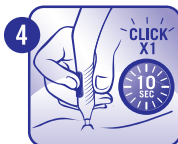

Platzieren Sie die Spitze des Stifts auf der Warze. Betätigen Sie jetzt einmal den blauen Knopf und belassen Sie die Spitze des Stifts für weitere 10 Sekunden auf der Warze. Bei größeren Warzen (> 6 mm) kann eine weitere Anwendung erforderlich sein.



Setzen Sie die blaue Kappe nach der Anwendung wieder auf den Stift und stellen Sie sicher, dass sich die blaue und weiße Noppe nicht auf einer Linie befinden (Kindersicherung).

Wiederholen Sie die Anwendung einmal pro Woche für maximal 6 Wochen bis die Warze vollständig entfernt wurde. Für jede weitere Anwendung wiederholen Sie Schritte 2-5. Achten Sie darauf, den Stift vor jeder Anwendung 3-mal auf eine flache Unterlage zu klopfen (blaue Kappe nach unten).

Für bessere Ergebnisse wird empfohlen, vor der Anwendung die betroffene Stelle für 5 Minuten in warmem Wasser zu baden. Trocknen Sie die betroffene Stelle gut ab, bevor Sie das Produkt anwenden.

NEBENWIRKUNGEN

Im Laufe der mehrwöchigen Behandlung kann sich die Warze dunkel verfärben. Dies ist normal und Teil des Heilungsprozesses. Es kann ein leichtes Kribbeln auftreten. Dies ist normal und vorübergehend. Falls die Beschwerden anhalten sollten, stoppen Sie die Behandlung und konsultieren Sie einen Arzt. Die behandelte Stelle sollte während und bis 30 Tage nach der Behandlung vor direktem Sonnenlicht oder UV-Strahlen geschützt werden, da dies zu einer Hyper- bzw. Hypopigmentierung und Irritationen führen kann. Nach erstmaligem Öffnen des Stifts innerhalb von 6 Wochen verbrauchen.

Für mehr Informationen: www.wartner.eu



Omega Pharma International nv, Venecoweg 26, 9810 Nazareth, Belgien

Vertrieb DE: Omega Pharma Deutschland GmbH, Benzstraße 25, 71083 Herrenberg
Vertrieb AT: Omega Pharma Austria Health Care GmbH, Rennweg 17, 1030 Wien

Stand der Informationen: Januar 2019

CE 0344

LF2321IA