

BE SURE Ovulationstest 7 Stück

Eine Packung enthält 7 Teststäbchen zur Bestimmung der fruchtbaren Tage durch eine zuverlässige Verlaufskontrolle der Fruchtbarkeit (LH-Anstieg). Der BE SURE Ovulationstest bietet über 99% Sicherheit bei 100% diagnostischer Sensitivität und enthält eine zweisprachige Anleitung (deutsch / englisch).

Testverfahren:

1. Entfernen Sie die Kappe, um die saugfähige Spitze freizulegen.
2. Urinieren Sie direkt auf die saugfähige Spitze, bis diese vollständig vollgesogen ist (mindestens 5 Sekunden).
3. Legen Sie den Test auf eine flache Oberfläche mit dem Anzeigefenster nach oben.
4. Lesen Sie das Ergebnis nach 3 – 10 Minuten ab.

Medizinprodukt
LH-Ovulationstest (Mittelstrahl)
In-Vitro-Diagnostikum zur Eigenanwendung
Sensitivität: 25 mIU LH / ml Urin

PZN 18501524