

Ellbogenschiene « Cubitofix Jeans »

Orthese zur Ruhigstellung des Ellbogens mit Einschluss des Handgelenks

Material:

Jeans, Polyester-Frottée („Coolquick“), Velcrobänder, Schaumstoff aus Polyurethan, Aluminium-Stabilisatoren.

Materialien mit Hautkontakt entsprechen Öko Tex 100 Standard



Indikation:

- Postoperative nach Eingriffen an Knochen und Weichteilen.
- Posttraumatisch nach Kontusion, Distorsion, Luxation.
- Entzündliche Erkrankungen
- Wundheilungsstörungen

Kontraindikation:

- Das Produkt darf bei bekannter Allergie gegen eines oder mehrerer der verwendeten Materialien nicht zum Einsatz kommen.

Applikation:

- Schiene öffnen und den Arm darin lagern. Dabei auf die richtige Größe achten. Bei korrekter Position des Ellbogens sollte auch das Handgelenk in die Ruhigstellung einbezogen werden können.
- Freie Ränder im Unter- und Oberarmbereich gleichsinnig überlappen.
- Orthese durch Fixation der Velcrobänder verschließen.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Bei Allergien gegen eines der verwendeten Materialien darf die Schiene nicht verwendet werden.
- Bei Druckbeschwerden sollte überprüft werden, ob die richtige Größe gewählt wurde. Ferner ist die Spannung der Velcrobänder zu überprüfen.
- Eine der individuellen Anatomie entsprechende Nachformung der Stabilisatoren durch eine autorisierte Fachkraft ist möglich.

Die Garantie und die Gewährleistung liegen im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen.

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

Trocken lagern.



Größen :

		Unterarmlänge	
Links:			
Art. No.:	85648 XX-Small	<30	cm
	85649 X-Small	30 - 32	cm
	85650 Small	32 - 34	cm
	85651 Medium	34 - 36	cm
	85652 Large	36 - 38	cm
	85653 X-Large	> 38	cm
Rechts:			
Art. No.	85659 XX-Small	<30	cm
	85654 X-Small	30 - 32	cm
	85655 Small	32 - 34	cm
	85656 Medium	34 - 36	cm
	85657 Large	36 - 38	cm
	85658 X-Large	> 38	cm



Zur chemothermischen Wäschedesinfektion gemäß § 18 Infektionsschutzgesetz sollte ein handelsübliches Desinfektionswaschmittel z.B. SuperSan forte nach Herstelleranweisung verwendet werden.

Vertrieb D:
TRIAMED GmbH & Co. KG
D-59348 Lüdinghausen

Hersteller + Vertrieb CH:
Omnimed AG, CH-9016 St. Gallen
www.omnimed.ch