



Cubitofix universale, 3-teilige Ellenbogenschiene

Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenkes

Material: Polyester-Frottee „Coolquick“, selbsthaftendes Polyester, Kunstleder, Velcro, Schaumstoff, Aluminium

Indikation: Postoperativ nach Weichteileingriffen und Osteosynthesen, posttraumatisch nach Kontusion, Distorsion, entzündliche Erkrankungen, Wundheilungsstörungen

Kontraindikation:

Das Produkt darf bei bekannter Allergie gegen eines oder mehrerer der verwendeten Materialien nicht zum Einsatz kommen.

Applikation:



Individuelle Einstellung der Weite: Seitliche Teile entfernen und gemäß Armumfang durch Verlagerung zur Streck- oder Beugeseite am zentralen Anteil refixieren.

Falls eine den Konturen des Armes entsprechende Formung der Stabilisatoren geplant ist, muss diese vor der Refixation der seitlichen Teile vorgenommen werden.

Schiene öffnen und den Arm darin bis zum guten Kontakt mit der Frottee-Innenschicht lagern.

Freie Ränder im Unter- und Oberarmbereich annähern, evtl. gleichsinnig überlappen und die Orthese mit den Velcrobändern verschließen.

Vorsichtsmaßnahmen: Bei Druckbeschwerden die korrekte Weiteinstellung überprüfen. Eventuell müssen die Stabilisatoren nachgeformt werden.

Größen: Art.-Nr. SX50300 Small – X-Large für links und rechts

Trocken lagern

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren.

SALZMANN AG, Salzmänn MEDICO, CH 9016 St. Gallen, Switzerland

OMNIMED® is a registered trademark of SALZMANN AG St. Gallen, Switzerland

Vertrieb D: TRIAMED GmbH & Co. KG, D 59348 Lüdinghausen

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

