

PRODUKTINFORMATION – Stand Juli 2025

GELENCIUM® Schmerzpflaster mit CBD

Stammdaten:

Produkt	Pack.-gr.	Art.-Nr.	PZN DE	PZN AT	EAN / GTIN	Pharmacode (CH)
GELENCIUM Schmerzpflaster mit CBD	6 Stück	312006	1936618	5888160	4260471893204	-

Kurzbeschreibung:

Schmerzpflaster mit bis zu 24h Wirkung – mit reinem CBD – Premium Apothekenqualität – einfache und flexible Anwendung

Produktbeschreibung:

Premium Schmerzpflaster mit langanhaltender Schmerzlinderung bei akuten und chronischen Schmerzen.

- Langanhaltende Schmerzlinderung – bis zu 24h
- Bei Rücken-, Muskel- & Gelenkschmerzen sowie Prellungen & Verstauchungen
- Mit reinem Premium CBD – wohltuend, pflegend & nicht berauschend

GELENCIUM® Schmerzpflaster ist ein innovatives und modernes Medizinprodukt der führenden Arthrose-Apothekenmarke GELENCIUM®. Es kombiniert langanhaltende Schmerzlinderung (bis zu 24h) mit den wohltuenden und pflegenden Eigenschaften von reinem CBD (Cannabidiol). Die optimale Passform (5 x 7cm) ermöglicht eine einfache und flexible Anwendung bei verschiedensten Schmerzarten. So kann das GELENCIUM® Schmerzpflaster neben chronischen Rücken-, Muskel- und Gelenkschmerzen auch akute Schmerzen durch Prellungen, Verstauchungen und Zerrungen effektiv lindern. Die Einhaltung höchster europäischer Qualitätsstandards sowie regelmäßige Testungen und Laboranalysen gewährleisten eine sichere Anwendung und hervorragende Hautverträglichkeit.

Unser Qualitätsversprechen

- Made in Denmark
- Wirksamkeit & Sicherheit geprüft (gemäß MDR 2017/745)
- Europäischer Cannabis-Anbau
- Ohne THC
- Kein Rausch- oder Suchtpotenzial

GELENCIUM® Schmerzpflaster erfüllt die höchsten Qualitätsanforderungen der deutschen Apotheken und überzeugt mit einer maximalen Sicherheit für Anwender. Gewährleistet wird dies unter anderem durch einen nachhaltigen und pestizidfreien Cannabis-Anbau in der EU, durch zertifizierte Rohstofflieferanten, strenge Produktionskontrollen sowie regelmäßiger Testungen. Damit ist die Anwendung zu 100% sicher und unbedenklich.

Anwendung:

Tragen Sie das Pflaster auf die zu behandelnde Stelle auf: Reinigen und trocknen Sie den betroffenen Bereich. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie das Schmerzpflaster. Ziehen Sie das Pflaster von der Schutzfolie ab und kleben Sie es auf die schmerzende Stelle. Verwenden Sie das Pflaster nur einmal am Tag und lassen Sie es nicht länger als 24 Stunden auf der Haut. Vermeiden Sie die Anwendung des Pflasters auf verletzter oder gereizter Haut, z. B. auf Schnitten, Kratzern, Sonnenbrand, Infektionen oder Hautausschlägen. Halten Sie sich immer an die Anweisungen auf der Produktverpackung. Nicht verwenden bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe.

Warnhinweise:

Nur zur äußerlichen Anwendung. Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf beschädigter oder verletzter Haut. Vermeiden Sie Augenkontakt. Nach Gebrauch sorgfältig die Hände waschen. Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von Haustieren aufbewahren. Nicht empfohlen für Kinder unter 14 Jahren - außer nach Rücksprache mit Ihrem Arzt. Personen mit einer Allergie gegen Alkohol, Lösungsmittel oder einen der Inhaltsstoffe sollten das Produkt nicht verwenden. Während der Schwangerschaft oder Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden. Tritt 2 - 3 Tage nach Beginn der Behandlung keine Besserung ein oder haben sich die Symptome erheblich verschlimmert, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Nebenwirkung

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Kontraindikation

Verwenden Sie das Schmerzpflaster nicht bei einer Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe.

Zusammensetzung:

Wirkstoff: 94,4 % Acrylic adhesive
Hilfsstoffe: Cannabidiol, Menthol und Arnika Fluid Extrakt
Das Schmerzpflaster enthält Alkohol.

Hinweise:

- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf beschädigter oder verletzter Haut.
- Vermeiden Sie Augenkontakt. Nach Gebrauch sorgfältig die Hände waschen.
- Nicht empfohlen für Kinder unter 14 Jahren - außer nach Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Personen mit einer Allergie gegen Alkohol, Lösungsmittel oder einen der Inhaltsstoffe sollten das Produkt nicht verwenden.
- Während der Schwangerschaft oder Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.
- Tritt 2 - 3 Tage nach Beginn der Behandlung keine Besserung ein oder haben sich die Symptome erheblich verschlimmert, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Aufbewahrung:

- Kühl (zwischen 10°C und 25°C) und lichtgeschützt aufbewahren.
- Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.
- Außerhalb der Reichweite von Haustieren aufbewahren.
- Verschließen Sie den Beutel nach Gebrauch fest.
- Das Schmerzpflaster darf nur bis zu dem auf der Packung angegebenen Verfallsdatum verwendet werden.
- Aufgrund der Beschaffenheit der Inhaltsstoffe kann nach einiger Zeit eine leichte Rosafärbung auftreten. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität des Produkts.

Nettofüllmenge:

6 Stück

Hersteller:

CANNORDIC A/S
Indiakaj 10
2100 Kopenhagen Ø

Vertrieb:

Heilpflanzenwohl GmbH
Alt-Moabit 101 D
10559 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 209 66 97 81
Email: customerservice@heilpflanzenwohl.com