



Lumbifix® Kreuzstützbandage

Stabilisationsbandage für die Lendenwirbelsäule

Materialien: Baumwolle (65%), Nylon (10%), Spandex (25%), Velcro, gelochtes Neopren, Schaumstoff, Aluminiumstabilisatoren, Stahlfedern.

Indikation: Lumbalgie bei degenerativen und destabilisierenden Erkrankungen der Lendenwirbelsäule (Spondylose, Spondylarthrose, Osteochondrose, Discushernie, Spondylolyse/Listhesis). Postoperative Stabilisierung der LWS. Stabile Frakturen der Lendenwirbelkörper. Muskuläre und/Oder ligamentäre Insuffizienz.

Kontraindikation: Verletzungen der Rotatorenmanschette. Bekannte Allergie gegen eines oder mehrere der verwendeten Materialien.

Applikation:



Die gewebeschützenden Stoffelemente von den Velcrostreifen an den seitlichen, elastischen Zügeln sowie am rechten Ende der Bandage entfernen. Bandage so am Rücken positionieren, dass das Etikett oben und der Hakenvelcrostreifen am Ende der Bandage, rechts liegt. Mit den Langfingern in die zwei Gurte an den Enden der Bandage gleiten und die Bandage vor dem Körper in der Mittellinie adaptieren. Die zwei dorsalen Stabilisatoren sollen nun symmetrisch neben der Lendenwirbelsäule auf der Rückenmuskulatur lokalisiert sein. Die zwei separaten seitlichen Zügel müssen gelöst sein und frei herunterhängen. Bandage durch zugf nach vorne und oben gleichmäßig anspannen und verschließen. Dazu muss zunächst das linke Ende über die Mittellinie nach rechts geschlagen, anschließend das rechte Ende gegenläufig nach links mit dem Hakenvelcroteil am Flauschteil der Bandage fixiert werden. Enden der seitlichen Gurte erfassen und mit der gewünschten Spannung vorne am Flauschteil der Bandage fixieren.

Vorsichtsmaßnahmen:

Keine defekten Produkte verwenden

Größen: Universal

Art.- No.	Bauchumfang
SX76802 Small	< 80 cm
SX76803 Medium	80 – 100 cm
SX76804 Large	100 – 120 cm
SX76805 X- Large	>120 cm

Trocken lagern

Die Garantie und die Gewährleistung liegen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

SALZMANN AG, Salzmänn MEDICO, CH 9016 St. Gallen, Switzerland

OMNIMED® is a registered trademark of SALZMANN AG St. Gallen, Switzerland

Vertrieb D: TRIAMED GmbH & Co. KG, D 59348 Lüdinghausen

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

