

MEDsan® SARS-CoV-2 Ag Duo

Der MEDsan® SARS-CoV-2 Ag Duo ist ein immunochromatographischer Festphasentest zum qualitativen *In-vitro*-Nachweis spezifischer Antigene von SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) in menschlichem **Speichel und Nasenabstrich-Proben**. Antigen ist im Allgemeinen im menschlichen Speichel und Nasenabstrich-Proben während der akuten Phase der Infektion nachweisbar.

Damit ist der MEDsan® SARS-CoV-2 Ag Duo einer der **am einfachsten einzusetzenden und anwendbaren Schnelltests**.



HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND

Vorteile:

- Schnelles Ergebnis – 15 – 20 Minuten
- Einfachste Handhabung auf dem Markt
- Testmöglichkeit, immer wenn kein Labor zur Verfügung steht


Ausstattung:

- Testkassette (im Folienbeutel inkl. Trockenmittel)
- Extraktionsröhrchen mit Extraktionspuffer
- Probenabstrichtupfer
- 1er und 25er Packung verfügbar
- Packungsbeilage (DE, EN, IT, ES, FR, PL, PT, RU)

| | |
|------------------------------|--|
| Format: | Lateral flow test/ Immunochromatographischer <i>In-vitro</i> -Test |
| Typ: | Qualitativ |
| Instrument: | Ohne weitere Geräte durchführbar |
| Probenmaterial: | Speichel und Nasenabstrich-Proben |
| Zieldetektion: | Antigen Nukleokapsid (N) |
| Auslesezeit: | 15 – 20 Minuten |
| Spezifität: | 100 % [95 % CI: 99,2 %, 100 %] |
| Sensitivität: | 96,7 % [95 % CI: 91,7 %, 98,7 %] |
| Nachweisgrenze (LoD): | 14,4 TCID ₅₀ /mL |
| Lagertemperatur: | 2 – 30 °C |
| Bezug: | Pharmazeutischer Großhandel und Apotheke |
| PZN: | 1er Packung: 17261638 25er Packung: 17261644 |
| Packungsgröße: | 1er / 25 Tests inkl. aller Verbrauchsmaterialien |
| Zulässige Anwender: | Geschultes Fachpersonal |
| Packungsbeilage: | 8 Sprachen (DE, EN, IT, ES, FR, PL, PT, RU) |

MEDsan® SARS-CoV-2 Ag Duo Schnelltest

Kurzanleitung

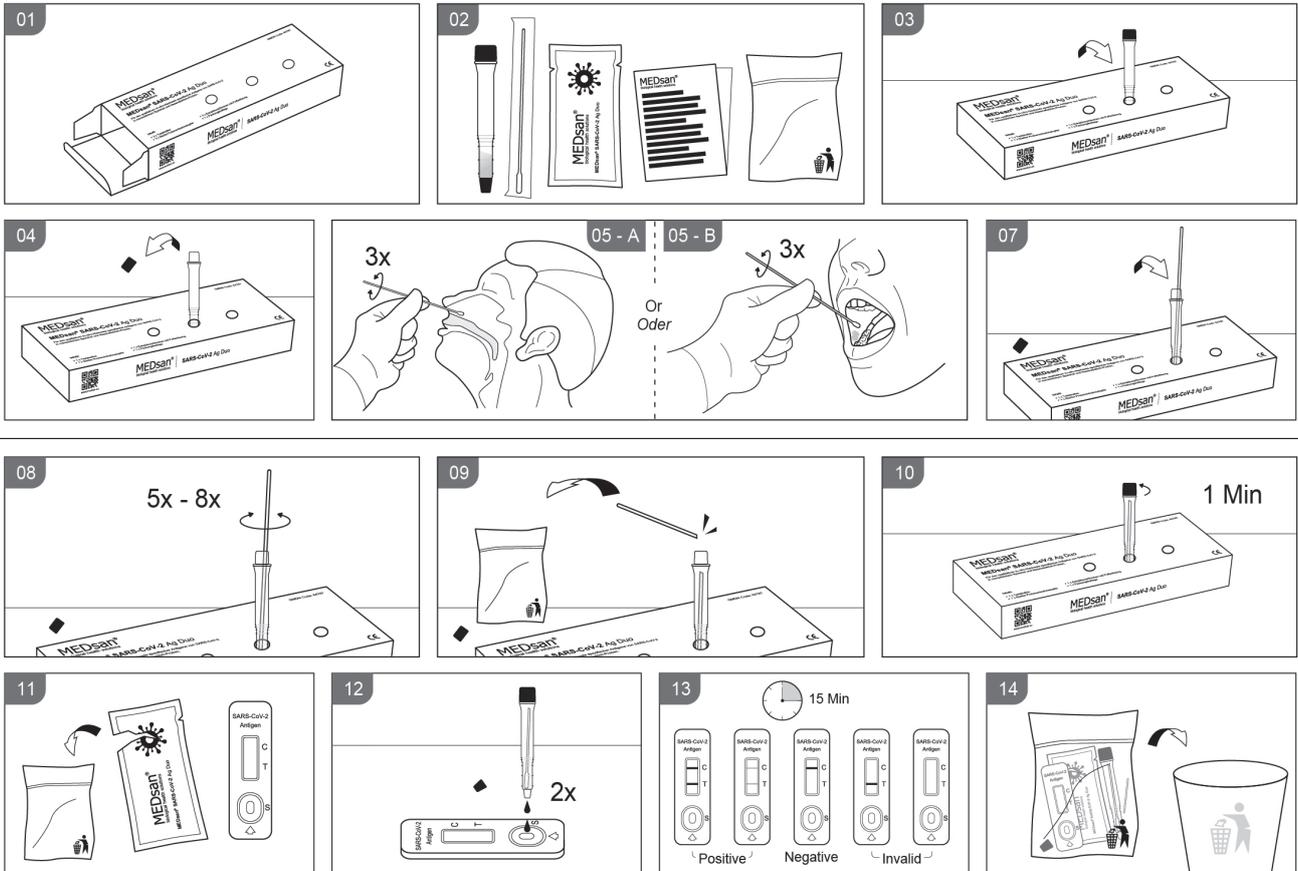

Performance:

Leistung des MEDsan® SARS-CoV-2 Ag Duo im Vergleich zu einem FDA autorisierten RT PCR Test

| | RT PCR | | | |
|----------------------------------|------------------------------|---------|-------|-----|
| | Positiv | Negativ | Total | |
| MEDsan® SARS-CoV-2 Ag Duo | Positiv | 116 | 0 | 116 |
| | Negativ | 4 | 500 | 504 |
| | Total | 120 | 500 | 620 |
| Relative Sensitivität | 96,7% [95% CI: 91,7%, 98,7%] | | | |
| Relative Spezifität | 100% [95% CI: 99,2%, 100%] | | | |
| Genauigkeit | 99,4% [95% CI: 98,4%, 99,8%] | | | |

Nachweisgrenze (LoD):

14,4 TCID₅₀/mL



HERGESTELLT IN
DEUTSCHLAND

Gemeinsam für Gesundheit. **KLINGE PHARMA**