

Endlich: Ein Hydrogel zur Mehrfachanwendung

Microdacyn[®]₆₀ hydrogel

Das ORIGINAL
seit
2004

Microdacyn[®]₆₀ Hydrogel ist ein stabilisiertes, hydroaktives, amorphes Gel zur Rehydrierung von nekrotischem und fibrinösen Gewebe. Es unterstützt das autolytischen Débridement und erzeugt ein physiologisches Wundheilungsmilieu.



Antimikrobielle Wirkung

Durch die antimikrobielle Wirkung und die Schaffung eines feuchten Wundmilieus ermöglicht das Microdacyn[®]₆₀ Hydrogel es dem Körper, den eigenen Heilungsprozess zu unterstützen.

Optimale Verträglichkeit

Da Microdacyn[®]₆₀ Hydrogel extrem gut verträglich ist, kann es auch auf freiliegenden Knochen, Sehnen und Bändern verwendet werden.

Indikationen

Microdacyn[®]₆₀ Hydrogel kann bei allen trockenen und schwach exsudierenden Wunden verwendet werden. Dies umfasst ebenfalls alle Wunden, die rehydriert werden müssen, sowie Verbrennungen bis Grad 2.

Mindesthaltbarkeit

Ungeöffnet bis zu 24 Monate bei Raumtemperatur haltbar, nach dem Öffnen innerhalb von 60 Tagen zu verbrauchen.

Inhaltsstoffe

Wasser, Natriumchlorid, Hypochlorige Säure, Natriumhypochlorit
Microdacyn[®]₆₀ Hydrogel ist ein umweltfreundliches Produkt, das ganz normal ohne besondere Vorschriften entsorgt werden kann.

Darreichungsformen

PZN	REF	Größe	Stk./VE	Stk./Umkarton
15255562	44211-00	60 g	1	24
13568104	44209-00	120 g	1	6
13568110	44207-00	250 g	1	6




Anwendungshinweise

Wunde säubern


Sollten sich beim Verbandswechsel noch Reste des Gels in der Wunde befinden, so können diese einfach mit Microdacyn₆₀[®] Wundspüllösung ausgespült werden.

Microdacyn₆₀[®] Hydrogel auftragen

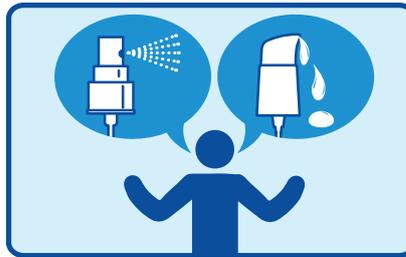

Das Microdacyn₆₀[®] Hydrogel wird standardmäßig mit zwei verschiedenen Spenderköpfen ausgeliefert: mit einem Sprühkopf und einem Pumpkopf.

Es ist einsatzbereit und erfordert kein Mischen oder Verdünnen.

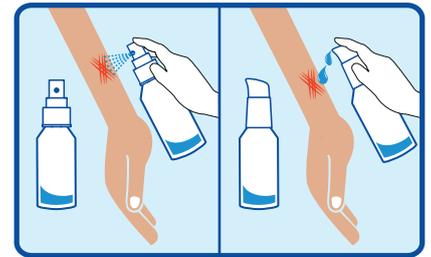

Für eine dünnere Schichtdicke auf der gesäuberten Wunde wählen Sie den beigelegten Sprühkopf.

Für eine dickere Schichtdicke auf der gesäuberten Wunde wählen Sie den beigelegten Pumpkopf.

Das Microdacyn₆₀[®] Hydrogel kann bis zu drei Tagen auf der Wunde belassen werden.

Abdeckung mit Wundauflage

Zur Abdeckung eignen sich alle handelsüblichen Wundauflagen. Sollte Microdacyn₆₀[®] Hydrogel in Wundhöhlen eingebracht werden, so müssen diese zusätzlich mit geeigneten Wundfüllern (z.B. Alginate oder Hydrofasern) austamponiert werden.

Problemlose Mehrfachanwendung

Im Vergleich zu den meisten anderen Hydrogelen, kann Microdacyn₆₀[®] Hydrogel **nach Anbruch noch 60 Tage verwendet werden**. Zudem ist es möglich, einen Gelspender für mehrere Patienten zu verwenden. Das Gel wird durch Natriumhypochlorit und hypochlorige Säure konserviert, diese Stoffe der körpereigenen Immunabwehr sorgen für die Stabilität des Produktes und machen es **hypoallergen**.

Vertrieb Deutschland

Haben Sie noch Fragen zum Microdacyn₆₀[®] Hydrogel, möchten Sie gerne mehr Informationen oder eine Produktschulung? Rufen Sie uns an – wir sind gerne für Sie da.



Bamboo Health Care GmbH
Zur Herrenmühle 2 · 79356 Eichstetten
Tel. 07663 914 03 -12 · Fax -14
mail@bamboo-health-care.com
www.bamboo-health-care.com

