



WEPA.shop



mosquito® Zecken-Haken, 2 St.

Artikel-Nr. 044154

Zecken entfernen im "Handumdrehen". Der mosquito® Zecken-Haken in zwei Größen zur einfachen Entfernung von Zecken - bei Mensch & Tier!



BESCHREIBUNG

Die mosquito® Zecken-Haken bieten einen schnellen und einfachen Weg, Zecken schonend zu entfernen. Der Zeckenhaken entfernt alle Zecken - unabhängig von Größe und Bissstelle. Die Zecke wird nicht gequetscht, wodurch die Übertragung von gefährlichen Krankheitserregern (Borreliose, Babesiose, usw.) deutlich verringert wird.

Perfekt für die Entfernung von Zecken bei Haustieren geeignet.

Anwendung:

1. Wählen Sie den passenden Haken aus, entsprechend der Zeckengröße.
2. Führen Sie die Einkerbung des Hakens von der Seite unter die Zecke.
3. Drehen Sie im oder gegen den Uhrzeigersinn bis die Zecke sich löst.
4. Einstichstelle desinfizieren.

Die mosquito® Zecken-Haken sind aus Polyoxymethylen (POM) gefertigt. Dieser Kunststoff ist recyclebar und kann ohne umweltschädliche Gase verbrannt werden. POM ist dauerhaft und den meisten Lösungsmitteln gegenüber resistent. Die Zecken-Haken sind unzerbrechlich, lange haltbar und endlos oft wiederverwendbar. Die Zecken-Haken können desinfiziert werden (z.B. mit Alkohol); eine Sterilisation im Autoklaven bei 140 Grad C ist ebenfalls möglich!

MERKMALE

Warenpräsentation	Einzelware
PZN	17184978
Verpackungseinheit	8