

A photograph of a woman with dark hair looking up at a baby. The baby is holding its hand to its mouth, appearing to be in pain or discomfort. The image is used as a background for a brochure cover.

NURSICARE[®]

Stillen ohne Schmerzen

FACHBROSCHÜRE

NURSIKARE® THERAPEUTISCHE STILLEINLAGEN ZUR BEHANDLUNG VON WUNDEN, RISSIGEN UND SCHMERZENDEN BRUSTWARZEN STILLENDER MÜTTER

Ständige Schmerzen im Brustbereich können dazu führen, dass Mütter mit dem Stillen aufhören wollen. Tatsächlich ist Schmerz einer der Hauptursachen dafür, dass Mütter das Stillen einstellen.

Die Nursicare Stilleinlagen sorgen für eine schnelle Schmerzlinderung und beschleunigen die Wundheilung. Es werden keinerlei weiteren Produkte oder Behandlungsmaßnahmen benötigt oder empfohlen. Die Einlage ist auch dann sehr nützlich, wenn die Mutter Schmerzen empfindet, obwohl keine Wunde oder Abschürfung sichtbar ist.

MÜTTER BERICHTEN*:

Lili Vardi:

„Ich habe eine Woche nach der Geburt meines Kindes damit begonnen, Nursicare zu verwenden. Die Einlage half nicht nur bei der Linderung meiner wunden Brustwarzen, sondern auch des gesamten Brustbereichs. Alles war sehr empfindlich und schmerzte. Die Einlagen sorgten auch dafür, dass meine Brüste nicht an Kleidungsstücken rieben. Ich weiß nicht, was ich ohne Nursicare getan hätte.“

Efrat Schwartz:

„Nursicare war meine Rettung beim Stillen.“

NURSIKARE® THERAPEUTISCHE STILLEINLAGEN - DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR MÜTTER:



SCHNELLE SCHMERZLINDERUNG

Die einzigartige Wirkstoffkombination unterstützt und fördert die Schmerzlinderung bei Wunden. Die wohltuenden Pads sorgen für eine Linderung wunder, rissiger oder schmerzender Brustwarzen.



EINFACH ZU ENTFERNEN

Nursicare Stilleinlagen sind angenehm und wohltuend. Sie werden aus modernen Polymermembranen hergestellt, deren Anwendung und patentierte* Zusammensetzung das Entfernen erleichtern. Die Pads hinterlassen keinen klebrigen oder öligen Film auf der Haut. Nursicare Stilleinlagen sind einfach zu entfernen und haften nicht an der Wunde.

* Mehr zu unseren Patenten finden Sie auf der Webseite nursicare.com



SCHNELLERE HEILUNG

Nursicare Stilleinlagen unterstützen den natürlichen Heilungsprozess und helfen bei der Wiederherstellung gesunder Haut, indem sie die Brustwarzen weich und flexibel halten, anstatt trocken, verletzlich und empfindlich.



ATMUNGSAKTIVE STILLEINLAGEN

Die Nursicare Pads ermöglichen es der Wunde zu „atmen“. Eine semipermeable Schicht auf der Außenseite der Einlagen sorgt für einen Gasaustausch und einen optimalen Feuchtigkeitsgehalt. Diese Schicht bewahrt die Wunde vor Kontaminationen von außen und hält austretende Flüssigkeit von der Kleidung fern.



SICHERHEIT

Nursicare Stilleinlagen erfüllen entsprechende internationale Sicherheits- und Effektivitätsstandards. Nursicare Pads wurden regulatorisch geprüft und in allen Vertriebsländern freigegeben. PolyMem® Produkte werden seit mehr als 25 Jahren sicher und effektiv angewendet.




VORBEUGUNG & SCHUTZ

Die Struktur und Wirkstoffe der Nursicare Stilleinlagen schützen die Brustwarzen und verhindern, dass sich der Zustand der Wunde verschlechtert. Ein dünnes Pad, weich und flexibel sowie angepasst an die anatomische Struktur der Brust, verhindert die Reibung der schmerzenden Brustwarze an Kleidungsstücken. Eine zusätzliche Säuberung der verletzten Brustwarzen ist nicht notwendig. Das milde Reinigungsmittel in den Einlagen sorgt dafür, dass die Wunde während des Heilungsprozesses sauber bleibt. Milchausfluss wird absorbiert und von den Einlagen gespeichert.



WIRKUNG VON NURSICARE®

Sobald Nursicare Pads auf den wunden Brustwarzen platziert werden, wirken ihre Bestandteile in einem perfekten Zusammenspiel gegen Schmerz und Entzündung und unterstützen den Heilungsprozess.

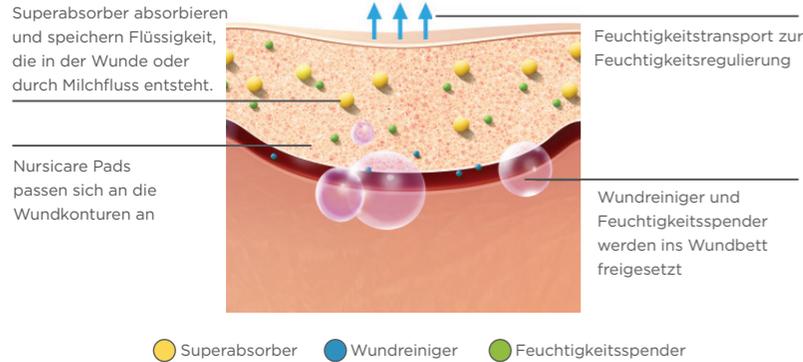

Die Kombination aus Wundreiniger, Feuchtigkeitsspender und Superabsorber bildet ideale Voraussetzungen für den Heilungsprozess und wirkt unterstützend bei verletztem und schmerzdem Gewebe.


DER HEILUNGSPROZESS:

- Die Pads absorbieren Flüssigkeit und dehnen sich behutsam aus, um einen vollständigen Kontakt zum cWundgrund herzustellen.
- Das integrierte Hautreinigungsmittel hilft dabei, das Wundbett sauber zu halten und entfernt beschädigtes Gewebe.
- Glyzerin, der Feuchtigkeitsspender von Nursicare, sorgt für ideale Voraussetzungen für die Wundheilung und bewahrt die Einlagen davor, an der Haut zu haften.
- Die einzigartigen Eigenschaften von PolyMem werden kombiniert, damit die Nursicare Stilleinlagen nicht nur extrem komfortabel sind, sondern auch das Entzündungsrisiko verringern, um sowohl den andauernden als auch den prozeduralen Schmerz zu behandeln.
- Der Superabsorber nimmt die Flüssigkeit von den Brustwarzen auf und schließt sie im Nursicare Pad ein, wodurch keinerlei Flüssigkeit im Wundbett zurückbleibt.
- Die äußere Schicht reguliert den Verdunstungsprozess und schützt die wunden Brustwarzen vor äußerer Verunreinigung.

ANWENDUNGSHINWEISE:

Anwendung der Stilleinlage:

- Reinigen Sie die Brustwarze und den umliegenden Bereich vor der ersten Anwendung der Nursicare Stilleinlage mit einem feuchten Tuch. Die Haut oder Brustwarze nicht abtrocknen - die verbliebene Feuchtigkeit unterstützt den Tragekomfort der Einlage.
- Tragen Sie die Nursicare Stilleinlagen innerhalb des BHs. Die beschriftete Seite sollte von der Haut weg zeigen. Legen Sie die Einlagen zentral auf den Bereich um die Brustwarze.
- Wischen Sie die Brust vor dem Stillvorgang oder der Verwendung einer Milchpumpe mit einem sauberen Tuch ab, das zuvor mit etwas Wasser oder Muttermilch befeuchtet wurde.
- Halten Sie die Einlage während des Stillvorgangs sauber, indem Sie sie mit der unbeschrifteten Seite nach oben auf eine saubere Oberfläche legen.

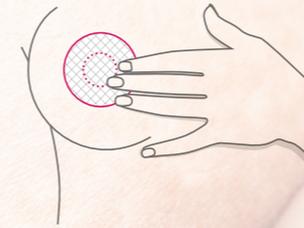

Wann sollten Sie die Stilleinlagen wechseln?

Ein Nursicare Pad kann so lange verwendet werden, bis die Flüssigkeit in der Einlage durch die beschriftete Rückseite sichtbar wird und bevor die absorbierte Flüssigkeit den Rand der Einlage erreicht. Wechseln Sie die Einlage sofort aus, wenn diese mit Milch durchtränkt ist. Nursicare Stilleinlagen können nicht gewaschen werden; beim Waschvorgang können die Bestandteile entfernt werden, was die Wirkung beeinträchtigt. Nach Verwendung entsorgen.



Feuchtes Nursicare Pad - muss nicht gewechselt werden



Saturiertes Nursicare Pad - muss ausgewechselt werden

ANNA FALLBEISPIEL 1

30-jährige Mutter mit dem ersten Kind. Kam vier Tage nach der Entbindung mit schmerzhaften Wunden an den Brustwarzen in die Klinik, verursacht durch falsches Anlegen beim Stillen. Sie konnte den Säugling nicht stillen, weshalb sie auf Milchpumpen umschwenkte, was ihr große Schmerzen bereitete. Sie war nicht in der Lage, ausreichend Milch abzupumpen, also musste sie Milchersatz hinzufügen. Zusätzlich zu den Wunden erlitt sie außerdem einen Milchstau, da sie aufhörte zu stillen und Milch abzupumpen. Sie wurde ausschließlich mit Nursicare behandelt.

ANFANG DER
NURSICARE-BEHANDLUNG



 Schmerzskala - 10

NACH 1 TAG



 Schmerzskala - 3

NACH 4 TAGEN -
ENDE DER BEHANDLUNG



 Schmerzskala - 0

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Gina Weissman, RN, IBCLC ©

JOHANNA FALLBEISPIEL 2

30-jährige Mutter mit dem zweiten Kind. In der Klinik eingetroffen mit einem "gelben" Säugling (Gelbsucht) und Milchstau. Die Mutter nahm an, dass das Kind richtig saugt, es gab jedoch keine effektive Milchabgabe (siehe Wunde) und keinen aktiven Stillvorgang, was zu einem Milchstau führte. Das Baby hatte außerdem ein anteriores Ankyloglosson (angewachsenes Zungenbändchen). Das Zungenbändchen wurde durchtrennt. Die Mutter erlitt an beiden Brustwarzen Wunden durch Reibung.

ANFANG DER
NURSICARE-BEHANDLUNG



 Schmerzskala - 10

NACH 2 TAGEN



 Schmerzskala - 1

NACH 3 TAGEN -
ENDE DER BEHANDLUNG



 Schmerzskala - 0

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Gina Weissman, RN, IBCLC ©

MICHELLE FALLBEISPIEL 3

34-jährige Mutter mit dem ersten Kind. Sie ließ eine Brustverkleinerung durchführen und wurde über die hohe Wahrscheinlichkeit informiert, nicht mehr stillen zu können. Sie kam fünf Tage nach der Geburt zur Konsultation in die Klinik. Baby mit posteriorem Ankyloglosson, Wunden durch Reibung auf beiden Seiten. Es wurden Brustödeme und Milchstau festgestellt, eine typische Diagnose nach Brustoperationen. Ohne Operation des Ankyloglossons und allein durch die Anwendung von Nursicare konnte innerhalb weniger Tage eine erhebliche Schmerzreduzierung und ein Wundheilungsprozess festgestellt werden, und das während das Kind weiter gestillt wurde.

ANFANG DER
NURSICARE-BEHANDLUNG



 Schmerzskala - 7

NACH 3 TAGEN



 Schmerzskala - 2

NACH 5 TAGEN -
ENDE DER BEHANDLUNG



 Schmerzskala - 0

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Gina Weissman, RN, IBCLC ©

KATE FALLBEISPIEL 4

34-jährige Mutter. Ernsthaftige Schmerzen in beiden Brustwarzen. Posteriore Ankyloglosson. Es wurde eine Behandlung durchgeführt. Allein durch die Anwendung von Nursicare konnte innerhalb weniger Tage ein erheblicher Schmerzrückgang und Wundheilungsprozess festgestellt werden, und das während das Kind weiter gestillt wurde.

ANFANG DER
NURSICARE-BEHANDLUNG



 Schmerzskala - 8

NACH 3 TAGEN



 Schmerzskala - 2

NACH 7 TAGEN -
ENDE DER BEHANDLUNG



 Schmerzskala - 0

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Gina Weissman, RN, IBCLC ©

FRAGEN & ANTWORTEN

Ist Nursicare sicher für Säuglinge?

Nursicare Stilleinlagen erfüllen entsprechende internationale Sicherheits- und Effektivitätsstandards. Die Einlagen wurden regulatorisch geprüft und in allen Vertriebsländern freigegeben. PolyMem® Produkte werden seit mehr als 25 Jahren sicher und effektiv angewendet.

Sollte man die Brustwarzen vor dem Stillen säubern?

Die Nursicare Stilleinlagen und Materialien sind zwar vollkommen unbedenklich, die Gesundheitsbehörden raten jedoch trotzdem dazu, sämtliche Substanzen vor dem Stillvorgang von den Brustwarzen zu entfernen. Reinigen Sie die Brustwarze einfach vorsichtig mit einem feuchten Tuch.

Ist es empfehlenswert, andere Produkte oder Behandlungen in Kombination mit Nursicare anzuwenden?

Nursicare Stilleinlagen enthalten alle notwendigen Inhaltsstoffe, um Schmerz zu lindern und die Wunde zu heilen. Aus diesem Grund ist es nicht erforderlich, zusätzliche Behandlungsmaßnahmen zu ergreifen. Weitere lokale Behandlungen in Verbindung mit Nursicare sind nicht nötig.

Was soll ich tun, wenn ich auch nach 24 Stunden keine Schmerzlinderung spüre?

Die wohltuenden Inhaltsstoffe werden freigesetzt, wenn die Einlage Flüssigkeit aufnimmt. Falls es keine Muttermilch aufnehmen kann und "trocken" bleibt, wird empfohlen, die Brustwarze mit etwas Muttermilch oder Wasser anzufeuchten. (Siehe Gebrauchsanweisung).

Wie lang sollte ich die Einlage tragen, um Schmerzen vorzubeugen?

Mütter können Nursicare Stilleinlagen so lange verwenden, wie sie möchten, vorausgesetzt sie wechseln die Polster ordnungsgemäß. Bitte lesen Sie sich auch die Gebrauchsanweisung in der Verpackung durch bevor Sie die Einlagen anwenden.

Das Pad füllt sich sehr schnell mit Flüssigkeit. Was kann ich dagegen tun?

Nursicare Pads haben ein hohes Absorptionsvermögen. Sie können mehrere Tage verwendet werden, bis sie vollständig gesättigt sind. In den meisten Fällen entsteht der größte Milchfluss direkt während des Stillens. Aus diesem Grund wird empfohlen, die Nursicare Stilleinlagen während des Stillvorgangs von beiden Brüsten zu entfernen. Diese Maßnahme verhindert, dass die Einlagen vollständig durchtränkt werden. (Siehe Gebrauchsanweisung). Die Intensität des Milchflusses variiert von Mutter zu Mutter.

Wo kann ich Nursicare Stilleinlagen erwerben?

In Deutschland werden Nursicare Stilleinlagen von der mediset clinical products GmbH vertrieben (www.mediset.de). Zudem sind die in Apotheken erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website www.nursicare.com.

WAS IST POLYMEM® ?

Wenn es um das Thema Wundheilung geht, fällt schnell der Name PolyMem. PolyMem-Verbände sind einzigartige, multifunktionale Wundauflagen, entwickelt um Schmerz zu lindern und Wunden effektiv zu heilen. PolyMem wird seit über 25 Jahren weltweit erfolgreich für akute und chronische Wunden verwendet.

Nursicare Stilleinlagen arbeiten nach denselben Prinzipien wie PolyMem-Verbände, wurden jedoch für Wunden, die beim Stillen entstehen, angepasst.

PolyMem und Nursicare werden produziert von: Ferris Mfg. Corp., Firmensitz in Fort Worth, Texas, USA. PolyMem Produkte werden weltweit in über 60 Ländern vertrieben.





NURSICARE[®]
Stillen ohne Schmerzen

Ihr Vertriebspartner in Deutschland:

mediset

mediset clinical products GmbH
Industriestr. 26
40822 Mettmann

Telefon: 0 21 04 - 3 68 32
Telefax: 0 21 04 - 3 68 95
E-Mail: info@mediset.de

www.mediset.de



MKL-713 R1 1116
© 2016 Ferris Mfg. Corp.