

# Schnelldesinfektion Konzentrat

**Nur verdünnt als Wischreiniger verwenden.**  
Verdünnung: 20 ml auf 1 Liter Wasser (2,0 %),  
Einwirkzeit: 15 min auf vorgereinigten Oberflächen, wirksam gegen Bakterien (*S. aureus*,  
*E. hirae*, *P. aeruginosa*), Hefen  
(*C. albicans*) und behüllte Viren.

## Wirkspektrum VAH Prüfmethode

(*P. aeruginosa*, *S. aureus*, *E. hirae*, *C. albicans*)  
Dosierung 1,0 % / Einwirkzeit 5 min

## Wirkspektrum Hepatitis-B Virus und HIV

(behüllte Viren) Dosierung: 5,0 % /  
Einwirkzeit 1 min

## Wirkspektrum Vaccinia-Virus (behüllter Virus)

Dosierung: 7,5 % / Einwirkzeit 1 min

### Wirksame Bestandteile in 100g :

3,33 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid,  
3,33 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 3,33 g Alkyl  
(12-14) dimethyl (ethylbenzyl) ammoniumchlorid

#### Sicherheitshinweise zum Konzentrat:

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden.  
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Darf  
nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die  
Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.  
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam  
mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach  
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**Gefahr**



PZN 16859865

N-94725



LOT



20330



A13342

**SCHUPP GmbH & Co. KG**

**Glattalstraße 78 · D-72280 Dornstetten**

**Tel.: 07443 2430 · [www.schupp.shop](http://www.schupp.shop)**