

PAIN- & AIRWAYMANAGEMENT

Atemwegsmanagement

PLACE - Sicherheit durch System

Thoraxdrainage-Set-Safety



Value Life

DIE LÖSUNG: THORAXDRAINAGE-SET SAFETY

Um das Risiko von Prozessfehlern unter Stress zu verringern, hat Vygon ein spezialisiertes Kompletts-Set für die Thoraxdrainage entwickelt, welches sichere Produkte, ein cleveres Verpackungsprinzip und eine ideale Anwendungsstrategie zu einem Gesamtpaket vereint. Dieses Prozedur-Set führt den Anwender durch die atraumatische Platzierung einer Thoraxdrainage und bietet produktseitig die größtmögliche Unterstützung.



Safety-Kanülen
Das aktive Sicherheitssystem schützt zuverlässig vor Nadelstichverletzungen gemäß TRBA 250



Metallinstrumente
Hochwertige Einmalinstrumente ermöglichen eine sichere Anlage der Drainage



Safety-Skalpell
Aktive Sicherung der Klinge nach der Hautinzision gemäß TRBA 250



Geschlitzte Kompressen
Als vorbereitete Wundauflage



Absaug- und Drainageventil
Verhindert den Rückfluss von Luft und Flüssigkeiten und ermöglicht einen Unterdruck von ~150 mbar

**HOCHWERTIGE
EINMALPRODUKTE**
**SICHERHEITS-
PRODUKTE**




**CLEVERES
ANWENDUNGS-
KONZEPT**

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Themenwelt auf www.vygon.de




DIE ANWENDUNG: ANLAGE NACH „PLACE“

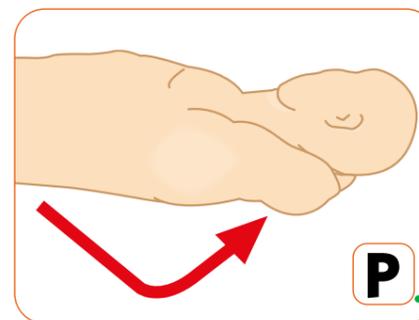


POSITION

Der Patient liegt auf dem Rücken und der Arm auf der betroffenen Seite wird hinter den Kopf gelegt.

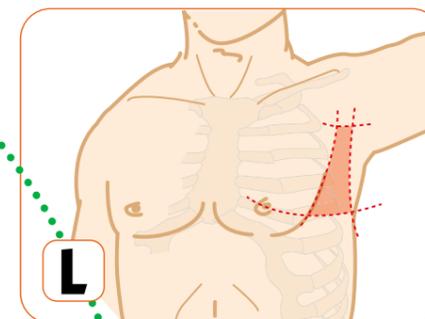


LOKALISATION

Der Arzt tastet nach der richtigen Einstichstelle. Diese liegt im sogenannten „Safe Triangle“ im Bereich des 4. bis 6. Interkostalraumes in der vorderen bis mittleren Axillarlinie.

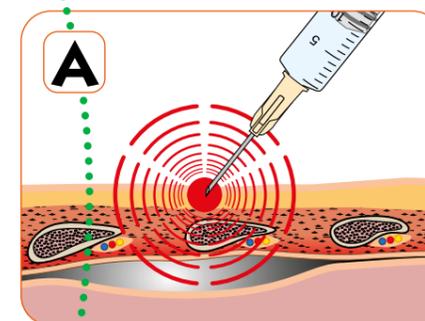


ANALGESIE

Vor der Anlage der Drainage wird das Gebiet der Inzision, der Naht und der Rippe mit Analgetika infiltriert.

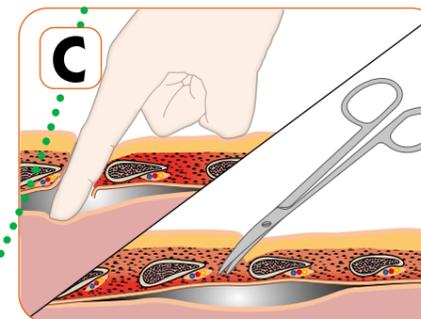

CHANNEL

Ohne Verwendung eines Trokars wird mit der Metzenbaumschere das Gewebe aufgespreizt, um einen Kanal für die Drainage zu präparieren. Die Pleura wird stumpf mit dem Finger durchstoßen.

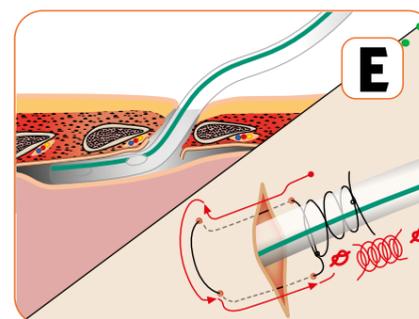

ENDE

Der Schlauch wird bis zur gewünschten Tiefe vorgeschoben. Die Thoraxdrainage wird anschließend mit einer Naht fixiert und die gewünschte Absaugung wird konnektiert.

THORAXDRAINAGE-SET SAFETY


Das Safety-Komplett-Set ist für die praxisgerechte Anlage einer Thoraxdrainage in der Notaufnahme oder im Rettungsdienst konzipiert

TRBA 250

Das Set ist auf die Anforderungen in der TRBA 250 abgestimmt und bietet durch qualitativ hochwertige Einzelkomponenten optimalen Komfort für den Anwender und ein hohes Maß an Patientensicherheit.

Setinhalt:

- Einschlagtuch (100 cm x 60 cm)
- Lochtuch (80 cm x 63 cm)
- 2 Tupferbecher (60 ml)
- 2 Tupferklemmen
- 4 Tupfer
- 5 Kompressen (10 cm x 10 cm, geschlitzt)
- 5 Kompressen (10 cm x 10 cm)
- **Safety-Kanüle** (25G, 16 mm)
- **Safety-Kanüle** (21G, 38 mm)
- Aufziehkanüle (18G, 1,2 x 40 mm)
- 2 Spritzen (10 ml)
- Thoraxdrainage
- transparenter Schlauch
- Absaug- und Drainageventil
- Sekret-Auffangbeutel (2000 ml)
- 2 Packungen Nahtmaterial gebogen
- Heftpflaster
- **Safety-Skalpell**, grün
- **Nadelhalter** (Metall)
- **Kornzange** (16 cm, Metall)
- **Metzenbaumschere** (Metall)

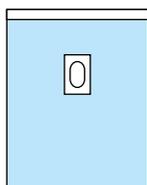

Fr	Katheter		PZN	Art.-Nr.	V.E.
	Ømm	Lcm			
14	4,5	28	13914598	V08772903	1
18	6,0	28	13914606	V08772902	1
20	6,7	28	13914612	V08772904	1
24	8,0	28	13914629	V08772901	1
28	9,0	28	13914635	V08772905	1

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE: info-de@vygon.com

Die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben dienen lediglich der Information und haben keinesfalls vertraglichen Charakter.

VYGON GMBH & CO. KG
PRAGER RING 100 – 52070 AACHEN – DEUTSCHLAND
TEL.: +49 (0)241 9130 0 – FAX: +49 (0)241 9130 106

www.vygon.de

7G99939000-PK-Thoraxdrainage-20230906 / Stand 2023-09

