

XTRATA®

TRANSPARENT FILM ROLL

Anlegen von XTRATA® Folienverbänden



1. Schneiden Sie den Verband mit einer Schere auf die gewünschte Länge. Entfernen Sie den Papierstreifen in der Mitte.
2. Legen Sie die Folienrolle auf den Anwendungsbereich und streichen Sie die Oberfläche glatt, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Entfernen Sie die Papierstreifen auf beiden Seiten (beim H24R05 gibt es nur einen Streifen auf jeder Seite).
3. Heben Sie die blauen Laschen in der Mitte der Abdeckfolien an und entfernen Sie sie vorsichtig.

XTRATA®

TRANSPARENT FILM ROLL

Einzigartige Folienverbände mit
hautschonender Haftschiicht

XTRATA® TRANSPARENT FILM ROLL, unsteril

Art.-Nr.	Größe auf Rolle	PZN
H24R05	5 cm x 10 m	16905654
H24R10	10 cm x 10 m	16905660
H24R15	15 cm x 10 m	16905677



Vorsichtsmaßnahmen

- Nicht direkt auf Wunden aufbringen.
- Vor dem Duschen/Baden prüfen, ob eine gute Haftung auf der Haut gegeben ist. Neuen Folienverband aufbringen, falls die Haftung unzureichend ist.
- Die Haut im Anwendungsbereich muss trocken und sauber sein. Eine Rasur kann notwendig sein, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
- Bringen Sie die Folie nicht zu straff auf der Haut auf.
- Die Anwendung sofort einstellen, wenn Sie eine Dermatopathie oder Auffälligkeiten beobachten sollten.
- Beim Entfernen die umgebende Haut mit der freien Hand sanft nach unten drücken, während Sie die Folie langsam in einem Winkel abziehen. Damit können Sie die Haftstärke der Folie verringern.
- Trocken und kühl lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Ihr Vertriebspartner in Deutschland

mediset
clinical products
mediset clinical products GmbH

Spenglerallee 12-14
04442 Zwenkau

Industriestr. 26
40822 Mettmann

Telefon: +49 (0)2104 - 3 68 32
Telefax: +49 (0)2104 - 3 68 95

E-Mail: info@mediset.de
www.mediset.de

US 10_2021


SCHUTZ
der zweiten Haut

- Starke und hautschonende Haftung
- Wasserfeste Fixierung von Primärverbänden
- Optimale Anpassung an beweglichen Stellen
- Infektionsschutz gegen bakterielle Besiedlung

XTRATA® TRANSPARENT FILM ROLL nimmt Hautschutz und Atmungsaktivität in den Fokus

XTRATA® Transparent Film Roll ist ein selbsthaftender transparenter Folienverband zum Schutz von Wunden und der sie umgebenden Haut sowie zur Fixierung von Primärverbänden und Kanülen. Die hohe Atmungsaktivität des Folienmaterials sorgt für eine optimal-feuchte Wundumgebung und minimiert das Mazerationsrisiko.

Eine spezielle Hafttechnologie sorgt für eine besonders hautfreundliche Verbandsablösung, bei der Schädigungen der Epidermis durch das Haftmittel vermieden werden.

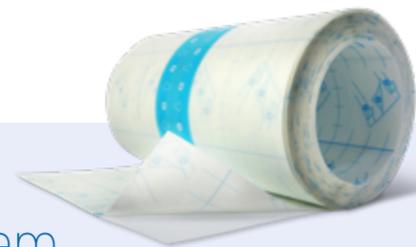

Schutzsystem für das Stratum Corneum

Die flexible Lipo-Gel-Haftschrift passt sich perfekt der unebenen Hautoberfläche an und zeigt ausgezeichnete Haftungseigenschaften. Gleichzeitig wird die Schädigung der Hornschicht beim Entfernen der Folie stark vermindert.

Als äußerste Hautschicht stellt das Stratum Corneum (Hornschicht) eine wichtige Barriere gegen das Eindringen externer Substanzen in die Epidermis dar und verhindert hohen Flüssigkeitsverlust aus dem Körperinneren. Deshalb kann eine außergewöhnlich starke Ablösung der Hornschicht, wie sie etwa bei der Anwendung herkömmlicher Klebefolien beobachtet wird, zu empfindlicher Rötung, Hautreizung und ernststen Beschwerden führen.

Dieser Problematik wirkt XTRATA® Transparent Film Roll durch seine besondere Hafttechnologie entgegen.


Konventionelle Produkte

Durch Entfernen der Hornschicht können Hautschäden verursacht werden.



XTRATA®

Es wird weniger Hornschicht entfernt.

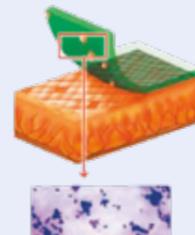

Indikationen

- > Schutz für Wunden oder Kanülen z.B. beim Baden oder Duschen
- > Schutz für Stoma und CAPD-Zugänge z.B. beim Baden oder Duschen
- > Befestigung von Kanülen und Schläuchen
- > Schutz der intakten Haut in der Wundumgebung z.B. bei der Unterdruck-Therapie
- > Fixierung von Primärverbänden an Gelenken oder anderen Stellen mit hoher Beweglichkeit

XTRATA® in der Praxis

Xtrata® Anbringung an der Ferse

(Der Verband wurde auf dem Foto eingefärbt, um ihn sichtbar zu machen.)



XTRATA®

TRANSPARENT FILM ROLL

XTRATA®-Vorteile:

HAUTSCHUTZ

Ausgezeichnete Hafteigenschaften

geringe Ablösung des Stratum Corneum - verringert Hautschäden durch Ablösung der Hornschicht

Schutz der intakten Haut in der Wundumgebung

z.B. bei der Unterdruck-Therapie

Hohe Feuchtigkeitsdurchlässigkeit

ermöglicht gute Transpiration und ein optimal-feuchtes Wundmilieu

Besonders feines und flexibles Material

Die Gesamtdicke von 60 µm bietet dauerhaften Schutz vor Reibung und Zugkräften

XTRATA® ist latexfrei

HANDHABUNG

Hervorragende Anpassungsfähigkeit und Elastizität

bei Anwendung an Gelenken oder anderen Stellen mit hoher Beweglichkeit

Applikation mit „behandschuhten Händen“

ist problemlos möglich

Wasserdichte Fixierung des Primärverbandes

Schutz von i.v.- Kathetern, Stoma- und CAPD-Geräten während des Badens

Sicherung von Tuben oder Drainagen

WEITERE VORTEILE

Wirkt als Barriere gegen Bakterien von außen


Funktioneller Infektionsschutz gegen bakterielle Besiedelung.

Transparente Oberfläche

ermöglicht eine Beobachtung der Anwendungsstelle (ohne Entfernen der Folie) oder beispielsweise temporäre Hautmarkierung bei Strahlentherapie

Made-in-Germany

zertifizierte und stetig überwachte Produktionsabläufe

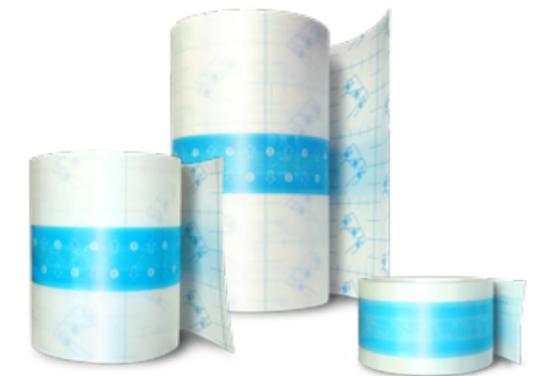

Wasserfest

