

Dr. Denti-Kit - Zahnfüllmaterial für ausgefallene Plomben

PZN 03149932 | Art. 697

Das Denti-Kit Zahnfüllmaterial ist ein provisorisches Füllmaterial auf der Basis von Zinkoxid, das ausgefallene Zahnplomben vorübergehend ersetzen kann. Denti-Kit können Sie direkt anwenden und müssen es vorher nicht anrühren.



Gebrauchsanweisung:

1. Eine kleine Menge Denti-Kit entnehmen.
2. Die Masse auf dem zu füllenden Zahn anbringen und anschließend die Zähne leicht zusammenpressen. Die Paste härtet bei Kontakt mit Speichel aus.
3. Eine Minute lang warten und anschließend den Mund mit lauwarmen Wasser ausspülen. Wasser wieder ausspucken und nicht schlucken.
4. Mindestens 15 Minuten nicht auf die neue Füllung beißen und auch keinen weiteren Druck ausüben.
5. So bald wie möglich einen Zahnarzt konsultieren.
6. Um schwer zugängliche Stellen mit Denti-Kit zu füllen, den beiliegenden Spachtel verwenden.
7. Bei sehr großen bzw. schmerzhaften Füllungen einen Zahnarzt konsultieren.
8. Bei kalten Raumtemperaturen kann es schwierig sein, das Füllmaterial aus dem Behältnis zu kriegen. In solch einem Fall den Behälter zum aufwärmen in der Hand halten und anschließend den Anwendungsvorgang wiederholen.

Aufbewahrung:

- Nach Verwendung gut verschließen.
- Kühl und trocken aufbewahren.
- Nach der Entnahme sollte das Denti-Kit-Material nicht wieder in den Behälter zurückgefüllt werden.

Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe

Dr. Denti, Zinc Oxide, Synthetische Füllmasse, Aromastoffe, Kalziumsulfat, Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat

Produktinformationen

Abmessungen: 2,70 x 12,10 x 9,00 cm
Artikelgewicht: 0,010 kg
Gewicht mit Verpackung 0,02 kg
Inhalt/Menge: 1 St
UVP: 16,99 € inkl. MwSt

Megadent

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39 info@megadent.de
40211 Düsseldorf Tel +49 211 17754 0
www.megadent.de Fax +49 211 17754 20

