

# Elektrische Zeckenzange

PZN 11522606 | Art. 8711

- Konstruktion der Zange zwingt die Zecke durch Druck ihren Griff zu lockern.
- Nach dem Entfernen der Zecke kann Strom eingeschaltet werden.
- **WARNUNG!:** Nimals den Strom einschalten, solange die Zecke sich noch am Körper befindet.



Halten Sie das Gerät in der Hand und nehmen Sie die Zange zwischen Daumen und Zeigefinger. Erfassen Sie die Zecke mit den Zangenspitzen und entfernen Sie sie, indem Sie die Zeckenzange drehen. Die Zange ist so konstruiert, dass sie größtmöglichen Druck auf das vordere Ende der Zecke ausübt und so dazu zwingt, ihren Griff zu lockern. Nach dem Entfernen der Zecke können Sie den Strom einschalten. Der Stromfluss zur Zecke ist so gering, dass kleine Tiere oder Kinder ihn nicht spüren. **WARNUNG!:** NIE DEN STROM EINSCHALTEN, SOLANGE DIE ZECKE SICH NOCH AM KÖRPER BEFINDET!

**Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe**  
Schwarz, 2x AG3 Batterien

**Produktinformationen**  
Abmessungen: 15,50 x 3,00 x 0,00 cm  
Artikelgewicht: 0,000 kg  
Gewicht mit Verpackung 68,00 kg  
Inhalt/Menge: 0  
UVP: 6,99 € inkl. MwSt

**Megadent**

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39  
40211 Düsseldorf  
www.megadent.de

info@megadent.de  
Tel +49 211 17754 0  
Fax +49 211 17754 20